

Einrichtung ACUSON NX3 für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
- Menüpunkt **SPEICHERTASTEN** (linkes oberes Drittel, Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
- unten im Text Punkt bei **TASTE NEU, Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
- Menüpunkt **NETZWERKEXPOR** anklicken
- Neben **HOST** auf **NEU** klicken
- **ALIAS** **(NX3)**
- **AE TITLE:** **NX3**
- **HOST NAME:** **NX3**
- **FESTE IP-ADRESSE** (Punkt setzen)
- **IP-ADRESSE:** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- **SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
- **STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
- **MEDIATYPE:** **Hardware Vorgabe**
- **DUPLEX-MODE:** **Hardware Vorgabe**
- **OK** anklicken, anschließend **SPEICHERN** (rechts unten)
- System neu starten (Netzschalter drücken, im Menü **NEUSTART** wählen . Falls kein Menü erscheint, etwas warten)

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
- Links im Menü **DICOM** anklicken
- Karteireiter **SPEICHERSERVER**
- **NEU** anklicken
- **ALIAS:** **sonoGDT**
- **AE-TITLE:** **sonoGDT**
- **IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- **PORT-NR.:** **105**
- **PING** anklicken (wenn kein Erfolg, Netzwerkverbindungen prüfen)
- **ECHO** anklicken (Wenn kein Erfolg, prüfen ob sonoGDT gestartet und mit dem Haken unten links eingeschaltet ist, Einstellungen der Firewall am Server prüfen, ggf. Port **105** freigeben)
- **ANWENDEN** anklicken
- **AUTOSPEICHERN ZU DICOM** **Ja**
- **NACH JEDEM BILD SPEICHERN** **Ja**
- **BILDFORMAT** **Automatik**
- **SR SENDEN** **Ja**
- **NO MONOCHROME CONVERSION** **Ja**
- **SPEICHERN** anklicken

- Karteireiter **ARBEITSLISTE SERVER**
- **NEU** anklicken
- **ALIAS:** **Worklist**
- **AE-TITLE:** **US01**
- **IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- **PORT-NR.:** **104**
- **PING** anklicken (wenn kein Erfolg, Netzwerkverbindungen prüfen)
- **ECHO** anklicken (Worklistserver auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 104 freigeben)
- **ANWENDEN** anklicken
- **STREAMLINED SUCHE** (Haken setzen)
- **STRICT VERIFICATION** (Haken setzen)
- **SPEICHERN** anklicken