

### Einrichtung ACUSON NX3 Netzwerkexport für sonoGDT

- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
  - Menüpunkt **SPEICHERTASTEN** (linkes oberes Drittel, Maustaste ist die Taste SET links vom Trackball)
  - unten im Text Punkt bei **TASTE NEU, Studie schließen und Einstellungen neu laden** setzen
  - Menüpunkt **NETZWERKEXPOR** anklicken
  - Neben **HOST** auf **NEU** klicken
  - **ALIAS** **NX3**
  - **AE TITLE:** **NX3**
  - **HOST NAME:** **NX3**
  - **DHCP VERWENDEN** (Haken entfernen)
  - **IP-ADRESSE:** **IP\_ULTRASCHALLGERÄT**
  - **SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
  - **STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
  - **MEDIATYPE:** **Hardware Vorgabe**
  - **DUPLEX-MODE:** **Hardware Vorgabe**
  - **OK** anklicken, anschließend **SPEICHERN** (rechts unten)
  - System neu starten (Netzschalter hinten links, im Menü **NEUSTART** wählen . Falls kein Menü erscheint, etwas warten)
- 
- Taste **VOREINSTELLUNGEN** (5. Taste in der obersten Tastaturreihe)
  - Menüpunkt **NETZWERKEXPOR** anklicken
  - **NETZWERKSTATUS ANZEIGEN:** **Haken setzen**
  - **AUTOSPEICHERN INS NETZWERK:** **Haken setzen**
  - **ALTES FORMAT:** **Punkt setzen**
  - Neben **EXPORT HOST** auf **NEU** klicken
  - **ALIAS:** **Server**
  - **IP-ADRESSE:** **IP\_SERVER**
  - **PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
  - **GEMEINSAMER ORDNER:** **sonoGDT\\$\_TMP\$** (Hinweis: die Backslashtaste ist direkt über der ENTER-Taste, \$-Taste = SHIFT+4)
  - **ACCOUNT:** **BENUTZERNAME** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
  - **KENNWORT:** **PASSWORT** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
  - **TEST SCHREIB** anklicken (wenn nicht erfolgreich, Freigabeberechtigungen, Nutzernamen und Passwort auf dem Server und in den Eingaben prüfen)
  - **OK** zum Schließen des Dialogs