

Aktivierung von WordConnect oder WordConnect Plus

- Starten Sie am Server, auf dem sonoGDT installiert wurde, vom Desktop das Programm **sonoGDT_Diagnose** (Schraubenschlüsselsymbol)
- Prüfen Sie in der ersten Zeile des Statusfensters, ob Sie eine Versionsnummer ab 29.0 vorliegen haben, auf die sich diese Anleitung bezieht, andernfalls klicken Sie unten rechts auf **Prüfe auf Updates** und aktualisieren Sie Ihre Version.
-
- Klicken Sie im rechten Bereich der Diagnose auf die Schaltfläche **Lizenzmanagement**
- Wechseln Sie oben links auf **WordConnect**
- Füllen Sie mindestens die farbige markierten Felder aus und klicken Sie unten links auf **Aktivieren**



sonoGDT Lizenzmanagement 29.0.2.3

Datei

sonoGDT WordConnect Fernwartung

Aktivierungskey:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

WordConnect-Lizenzserver an Port 1245 gestartet

Praxisname/Firma: (optional)

Praxis am See Dr. Max Mustermann

Anwender 1:

Dr. Irina Musterfrau

Anwender 2: (optional)

ggf. weitere Nutzernamen

Ort:

Musterstadt (mit oder ohne PLZ)

Zusatzinformation: (optional)

Standort Musterstrasse

Aktivieren Deaktivieren Reparieren Offline Entwerten