

Anleitung zur Einrichtung von Albis für Ultraschallsysteme mit Worklist

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Server\sonoGDT](#) erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

Sie benötigen in Albis ein **Tageskennwort** sowie den sogenannten **Key für externe Freischaltungen**, damit Sie die GDT-Schnittstelle konfigurieren können. Schließen Sie alle Patienten und wechseln Sie über **Optionen/Wartung/Externe Programme** zum Konfigurationsdialog. Klicken Sie auf **Einfügen** und wählen Sie aus dem Dialog das Programm Tool.exe im Installationsverzeichnis von sonoGDT.

Konfigurieren Sie nun die Einträge gemäß dem Screenshot und passen Sie den Namen **\\Server** an Ihren tatsächlichen Servernamen an:

Befehlszeile: \\Server\sonoGDT\Tool.exe
Menütext: Ultraschalluntersuchung
Parameter: /6302_6311
Arbeitsverzeichnis: \\Server\sonoGDT
Karteikartenkürzel: us
Ausführung: Patient aktiv
Dateibezeichnung (\$AUS): \\Server\sonoGDT\GDT\tooledv1.gdt
Dateibezeichnung (\$EIN): [\\Server\sonoGDT\GDT\edv1tool.gdt](#)

Externe Programme

Menüeinträge:
Ultraschall Auftrag

Einfügen Höher OK
Löschen Tiefer Abbruch
Hilfe

Befehl:
Befehlszeile: \\PRAXISSEVER\sonoGC
Menütext: Ultraschall Auftrag
Parameter: /6302_6311
Arbeitsverz. (\$VERZ): \\PRAXISSEVER\sonoGC
Karteikartenkürzel: US
Statuszeilentext:

Ausführung: immer Patient aktiv
 Programmende abwarten
 16 Bit
 Windows-Programm
 Datenbanken schließen

Übergabedateien
Aufruf
 Ohne GDT 6301
 BDT (7/92) Office-Dokument
 BDT (2/94) GDT 6302
 BDT (Mix) Diabetes BDT 2.0
 Convis GDT 6301 + 6302
GDT-Version
 2.0 2.1

Untersuchungsart: SON000
Sonographie, allgemein


Dateibezeichnung (\$AUS): \\PRAXISSEVEI

Rückgabe
 Ohne BDI/GDT
Dateibezeichnung (\$EIN): \\PRAXISSEVEI

Aktion bei erneuter Validierung: Nicht übernehmen

Workflow:

Tippen Sie in der Karteikarte des zu untersuchenden Patienten das Kürzel **us** in die Befehlszeile und wechseln Sie mit der Tabulatortaste in die nächste Spalte. Zur Kontrolle öffnet sich für 2 Sekunden ein Fenster mit der aktuellen Worklist, im Anschluss sehen Sie in der Karteikarte einen Eintrag

JA | 05.03.2016  | us | Verfahren: Sonographie, allgemein - Datum: 05.03.2016 - Uhrzeit: 16:00:04 - Sonographie -

Rufen Sie am Ultraschallsystem die Worklist ab und untersuchen Sie Ihren Patienten, die Bilder werden am Ende der Untersuchung automatisch zum Server übertragen und können nun durch einen Doppelklick auf den Karteieintrag geöffnet werden.