

### Einrichtung Netzwerkexport für Alpinion Ultraschallsysteme für sonoGDT

- Taste **SYSTEM/PRESET** (in der obersten Tastaturreihe)
- Links Menüpunkt **KONNEKTIVITÄT** (Maustaste ist die Taste **SET** rechts vom Trackball)
- Karteireiter **ALLGEMEINES** wählen
- Die Geräteangaben unverändert belassen
- Punkt setzen bei **FOLGENDE IP-ADRESSE VERWENDEN**
- IP-ADRESSE:** **\$USIP\$**
- SUBNETZMASKE:** **\$SUBNETZMASKE\$**
- STANDARDGATEWAY:** **\$GATEWAY\$**
- NETZWERKEGSCHW.** **Autodetect**
- Haken setzen bei **DICOM-SPOOLER-JOBS BEIM START AUS WARTESCHLANGE LÖSCHEN**
  
- NETZWERKSPEICHER** anklicken (unten rechts)
- ZIELNAME** **sonoGDT**
- FREIGELEG. VERZ.:** **\\\$SERVERIP\$\sonogdt\\$TMP**  
**\$\studies**  
(Hinweis: diese Freigabe ist bei der Installation von sonoGDT angelegt worden)
- ID:** **\$ACCOUNT\$** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- PASSWORT:** **\$PASSWORD\$** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- GERÄT** (Voreinstellung belassen, z.B. **Z:**)