

Einrichtung von B-K Medical Ultraschallsystemen für den Netzwerkexport (ohne DICOM)

- Karteireiter **BILD** anklicken (ganz unten links)
- Button **ADVANCED** (direkt darüber), anschließend Button **ANPASSEN...** klicken
- Karteireiter **SYSTEM**, auf diesem dann Karteireiter **NETZLAUFWERK**
- NETZWERK KONFIGURIEREN**, das Passwort lautet **n w**
- LOCAL AREA CONNECTION** anklicken (falls sich kein Fenster öffnet, statt dessen Taste **+** über dem Trackball drücken)
- PROPERTIES** anwählen
- Auf **INTERNET-PROTOCOL (TCP/IP)** doppelklicken
- USE THE FOLLOWING IP-ADRESS** (Haken setzen)
- IP-ADRESSE:** **\$ U S I P \$**
- SUBNETZMASKE:** **\$ S U B N E T Z M A S K E \$**
- STANDARDGATEWAY:** **\$ G A T E W A Y \$**
- DNS-SERVER:** (beide frei lassen)
- alle Fenster mit **OK** schließen, das Fenster Network Connections über das Kreuz oben rechts schließen
- SERVER (UNC-PFAD)** **\\\$SERVERIP\$\sonoGDT\TMP**
- \$\studies**
- BENUTZERNAME:** **\$ACCOUNT\$** eines Server-Benutzers
- PASSWORT:** **\$PASSWORD\$** eines Server-Benutzers
- TESTVERBINDUNG** sollte nun eine erfolgreiche Verbindung zeigen
- OK**