

Einrichtung des B-K Medical Specto Ultraschallsystems via DICOM

- auf dem **Touchscreen** auf das Zahnrad tippen (ganz oben rechts)
- das System steht initial auf DHCP und bezieht vermutlich automatisch eine IP Adresse

- links auf den Menüpunkt **Speichern/Netz...** tippen
- Karteireiter **DICOM/PACS**
- **AE-Title: USBKMED** (oder frei wählen)
- **Anwenden** (die Meldung zum Neustart ignorieren, wird später erledigt)

- Unter **Worklist** den Button **ADD** tippen
- **Name: Worklist**
- **AE Titel: US01** (0= Null, Großschreibung beachten, kein anderer AE-Title!)
- **Host-Name / IP-Adresse: IP des Servers**
- **Port Number: 104**
- **Suchfilter: Nur Ultraschallsysteme**
- Klick auf **Test** sollte erfolgreich sein
- mit **OK** bestätigen

- Unter **PACS** den Button **ADD** tippen
- **Name: sonoGDT**
- **AE Titel: sonoGDT**
- **Host-Name / IP-Adresse: IP des Servers**
- **Port Number: 105**
- **Archivierungsmethode: Auto**
- **Standard-PACS: Ja**
- **Timeout bei autom. Senden: sofort**
- **Bildfarbe: Farbe**
- Klick auf **Test** sollte erfolgreich sein
- mit **OK** bestätigen

- System neu starten