

## Konfiguration für Chison Ultraschallsysteme mit DICOM

- Taste **Schraubenschlüssel** (auf Tastatur unterste Reihe, 3. Taste von links)
- Reiter **Netzwerk** (oben im Menü) anklicken (Maustaste ist die ENTER Taste rechts neben dem Trackball)
- Haken entfernen bei **IP-Adresse automatisch erhalten**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standard-Gateway: **Gateway-IP**
- DNS-Server: **Gateway-IP**
- **Anwenden** (in der Mitte weiter unten)
  
- Karteireiter **DICOM**
- Lokale AE: **CHISON**
- Port: **(unverändert lassen)**
  
- unten rechts **Hinzufügen**
- Bedienung: **Speicherung**
- CharSet: **ISO\_IR 100**
- AE-Titel: **sonoGDT**
- Host: **IP des Servers**
- Port: **105**
- Alias: **sonoGDT**
- Modus: **Folgen**
- Haken bei **DICOM SR**
- alle anderen Einstellungen belassen, **OK** anklicken
- die Zeile mit dem Eintrag **Speicherung** anklicken, unten rechts **Überprüfen** anklicken
  
- Karteireiter **DICOM**
- unten rechts **Hinzufügen**
- Bedienung: **Arbeitsliste**
- AE-Titel: **US01** (US null eins!)
- Host: **IP des Servers**
- Port: **104**
- Alias: **Worklist**
- Update Methode: **Beim Start und jede 5 Min**
- alle anderen Einstellungen belassen, **OK** anklicken
- die Zeile mit dem Eintrag **Arbeitsliste** anklicken, unten rechts **Überprüfen** anklicken
  
- Karteireiter **Allgemein**
- Karteireiter **Tastatur**
- Sektion PC Druck&Image Speicherung: **Bild und Info**
- Film-Speicher-Option: **Film und Information**
- Video Druck Optionen: **Bild und Info**
  
- ganz rechts unten **OK**