

Konfiguration Chison SonoAir 70 mit DICOM

- Taste **Setup** drücken

weiter auf dem **Touchscreen** :

- links auf **Net** tippen
- im Reiter **Settings** im Bereich **Net** den Punkt auf **Static** setzen
- Ip address: **IP des US-Gerätes**
- Netmask: **Subnetzmaske des Servers**
- Gateway: **Gateway-IP**
- auf **Apply** tippen

- im Hauptmenü links auf **DICOM** tippen
- Local AE Title: **CHISON**
- unten auf **Add** tippen
- Haken setzen bei **Default**
- Service: **DICOM Storage**
- Server AE Title: **sonoGDT**
- Server IP Address: **IP des Servers**
- SCP Port: **105**
- Compression Ratio: **Low**
- Max Framerate: **Full**
- den Rest unverändert belassen
- oben links auf das **Häkchen** tippen
- in der Tabelle auf **DICOM Storage** tippen (die Zeile ist markiert)
- unten rechts auf **Verify** tippen (sollte dann oben als **Successfully!** angezeigt werden)

- unten auf **Add** tippen
- Haken setzen bei **Default**
- Service: **DICOM Worklist**
- Server AE Title: **US01**
- Server IP Address: **IP des Servers**
- SCP Port: **105**
- Scheduled Station AE Title: **Any**
- Start Date: **Today**
- den Rest unverändert belassen
- oben links auf das **Häkchen** tippen
- in der Tabelle auf **DICOM Worklist** tippen (die Zeile ist markiert)
- unten rechts auf **Verify** tippen (sollte dann oben als **Successfully!** angezeigt werden)

- unten links bei **DICOM Storage** das Häkchen setzen bei **Send while saving**
- unten rechts bei **DICOM SR** das Häkchen setzen bei **Send after ending exam**

- im Hauptmenü links auf **General** tippen
- in den Reiter **Keyboard** wechseln

- links die Taste **PRINT 1** auswählen
- rechts auf **Store Image** tippen
- wenn gewünscht: analog für **PRINT 2** die Funktion **Store Cine** auswählen (für Clips)

- rechts auf **OK** tippen