

Einrichtung Clarius mit DICOM für sonoGDT

Voraussetzung:

Das mobile Gerät, auf dem Sie die Clarius APP benutzen, muss sich in einem WLAN befinden, mit dem Ihr Server auf IP Adresse **IP des Servers** erreicht wird (Ihre EDV befragen).

- oben links auf den nach **links zeigenden Pfeil im Rechteck** tippen
- oben links auf die **3 waagerechten Linien** tippen
- links auf **Einstellungen** tippen
- nach unten scrollen
- auf **DICOM Server-Einstellungen** tippen

- unten rechts auf das **+** Symbol tippen
- Servertyp: **Speicher**
- Server AE-Titel: **sonoGDT**
- Serveradresse: **IP des Servers**
- Port: **105**
- auf **Speichern** tippen
- unter dem **DICOM-Server sonoGDT** auf **C-ECHO** tippen (es sollte dann als Zeichen für eine erfolgreichen Verbindungsprüfung ein grüner Haken davor erscheinen)

- unten rechts auf das **+** Symbol tippen
- Servertyp: **Arbeitsliste**
- Server AE-Titel: **US01 (US null eins, kein anderer!)**
- Serveradresse: **IP des Servers**
- Port: **104**
- auf **Speichern** tippen
- unter dem **DICOM-Server US01** auf **C-ECHO** tippen (es sollte dann als Zeichen für eine erfolgreichen Verbindungsprüfung ein grüner Haken davor erscheinen)