

Anleitung zur Einrichtung von sonoGDT für Doctolib

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Servername\sonoGDT](#) erreicht.

Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration**, wählen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware Doctolib** aus der Liste und klicken Sie auf Schnellkonfiguration.

Nehmen Sie an jedem Arbeitsplatz, an dem sonoGDT verwendet werden soll, folgende Einstellungen vor:

- Legen Sie einen Ordner **C:\GDT** an, falls er noch nicht existiert
- Verbinden Sie dauerhaft ein Netzlaufwerk zu sonoGDT, also z.B. **Z:** als **\\Servername\sonoGDT**
- Klicken Sie in Doctolib oben rechts auf das Zahnrad für die Einstellungen
- wählen Sie im Menü **Erweiterte Einstellungen**, darunter **Geräteintegration und Verbindungen**
- Klicken Sie auf **Verbindung erstellen**, füllen Sie die 3 Felder wie folgt aus:
 - Name des Gerätes: **sonoGDT Anzeige**
 - Gerätetyp: **US** (nicht in der Liste, manuell eintragen!)
 - Marke des Gerätes: **sonoGDT** (nicht in der Liste, manuell eintragen)
- wechseln Sie oben rechts auf **GDT-Exporteinstellungen**, füllen Sie 5 Felder aus:
 - Dateiname: **viewedv1.gdt**
 - Ordnerpfad: **\\Server\sonoGDT\GDT**
 - Zeichensatz: **ISO8859-1 (ANSI) CP1252**
 - GDTVersion: **2.10**
 - Kommandozeile: **Z:\sonoGDT\GDTViewer.exe**
- Speichern Sie die Verbindung
- Klicken Sie erneut auf **Verbindung erstellen** und wiederholen Sie die Schritte für die Worklist mit folgenden Einstellungen:
 - Name des Gerätes: **sonoGDT Worklist**
 - Gerätetyp: **US** (nicht in der Liste, manuell eintragen!)
 - Marke des Gerätes: **sonoGDT** (nicht in der Liste, manuell eintragen)
- wechseln Sie oben rechts auf **GDT-Exporteinstellungen**, füllen Sie 5 Felder aus:
 - Dateiname: **sonoedv1.gdt**
 - Ordnerpfad: **\\Server\sonoGDT\GDT**
 - Zeichensatz: **ISO8859-1 (ANSI) CP1252**
 - GDTVersion: **2.10**
 - Kommandozeile: **Z:\sonoGDT\Showworklist.exe**
- Speichern Sie die Verbindung

Workflow:

Öffnen Sie Ihren Patienten im Patientennavigator, klicken Sie rechts unter **Patient:in** auf **Untersuchung mit medizinischem Gerät starten**, wählen Sie **sonoGDT Worklist** und **Senden**, um einen Patienten zum Ultraschallgerät zu senden oder **sonoGDT Anzeige** und **Senden**, um die Bilder anzuzeigen.