

Konfiguration EDAN Ultraschallsysteme mit DICOM

- auf dem Bildschirm unten links auf die Zahnräder klicken
- auf dem Bildschirm dann auf **Setup** klicken, dann auf **Konnektivität** klicken

- Karteireiter **TCP/IP**
- **Kabel-Einstell.**
- **Statische IP (manuell)** markieren
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Gateway: **Gateway-IP**
- DNS: **Gateway-IP**
- **Speich.**

- Karteireiter **DICOM**
- links auf **Allg.** klicken, dann unter der Tabelle auf **Zufügen** klicken
- Name: **WORKLIST**
- AE-Titel: **US01**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port: **104**
- Servicetyp: **Arb.liste**
- auf **OK** Klicken

- unter der Tabelle erneut auf **Zufügen** klicken
- Name: **sonoGDT**
- AE-Titel: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port: **105**
- Servicetyp: **Speicher**
- auf **OK** Klicken

- Karteireiter **Arb.Liste**
- Arb.liste akt.: **Haken setzen**
- Arbeitsl.-Server: **WORKLIST**
- Arbeitsliste akt.: **Bei Bedarf**
- Beendete gepl. Unters. anzeigen: **Haken setzen**
- Filter: **alle deaktivieren**
- Datumsbereich: **Heute**

- Karteireiter **Speicher**
- Speicherserver: **sonoGDT**
- DICOM-Bildspeicher: **Autom. Übertr. b. Unters.ende**
- DICOM-Clipspeicher: **Autom. Übertr. b. Unters.ende**

- unten rechts auf **Speich.** klicken, dann auf **Beend.** klicken