

## Anleitung zur Einrichtung von EL

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das komplette Installationsverzeichnis von sonoGDT auf dem Server mit dem Namen **sonogdt** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Server\sonogdt](#) erreicht. In den folgenden Screenshots müssen Sie in den UNC-Pfaden jeweils nur den Namen des Servers an Ihre Gegebenheiten anpassen.

Sie müssen in EL die Geräteschnittstelle S82 (sonoGDT) konfigurieren. Die Geräteschnittstelle S82 müssen Sie daher zunächst über Ihren EL Praxisbetreuer bestellen und aktivieren lassen.

Wählen Sie über das Menü **Optionen/Systemeinstellungen** und unten die Schaltfläche **Schnittstelle zu externen Geräten**.

Richten Sie das Gerät sonoGDT nach folgendem Screenshot ein. Der Pfad zu sonoGDT kann sowohl über einen verbundenen Laufwerksbuchstaben (im Beispiel F:\) als auch über einen UNC-Pfad angegeben werden.

### sonoGDT:

**Schaltflächen (Funktionen): SonoWL, Sonolmp, SonoView (sonoGDT Worklist, Befundimport, Anzeige)**

Server-Verzeichnis (z.B. \\SERVER\SONOGDT)  SonoWL mit  donothing.exe  tool.exe  
F:\SONOGDT  Parameter /6302\_6311

Datenaustausch zwischen EL und sonoGDT im sonoGDT-Unterverzeichnis 'GDT'  
EL-Exportdatei für Worklist: **tooledv1.gdt** angeforderte Untersuchung (FK 8402)  
Rückgabedatei von sonoGDT nach Untersuchung: SONO00 (ALLG00)  
**edv1tool.gdt** Test-Ident  
EL-Exportdatei für Anzeige der Untersuchungen: **tooledv1.gdt** (FK 8410)  
GDT-Version 2.1, Zeichensatz: ISO 8859-1 (ANSI)  
 EL löscht ausgelesene sonoGDT-Rückgabedateien im GDT-Verzeichnis  
Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü (Behandlung - Schnittstellen-Import)

Handhabung der Patientenummer beim Datenaustausch mit sonoGDT  
Patientennummer  (3000)  EL-Nr. verkürzen (z.B. '1001' statt '001001')  
ab Mandant B (Bsp.: B, EL-Nr. 1001)  (00)1001B  B(00)1001  2001001

sonoGDT-Rückgabedatei: Feldkennungen (FK) und Auswertung  
Untersuchungstyp  (8402) Untersuchungsdatum  (8432, 6200) Untersuchungszeit  (8439, 6201) Weitere identifizierende FK

kompletten Inhalt unbearbeitet übernehmen  
 diese Feldkennungen auslesen (z.B. 6220, 6228, 8470, 8480)

Befundüberschrift (ggf. feststehende ausführliche Bezeichnung der Untersuchung)

Abspeicherung im Krankenblatt als Befundeintrag

FK	Bezeichnung / Überschrift
6220	Befund
8470	Zusatzbemerkungen

Wählen Sie im Menü von EL Optionen/Arbeitsweise, dort rechts die **Schaltflächen Krankenblatt**

Wählen Sie zunächst **KASSE** und verschieben Sie aus der Auswahlliste **Weitere Funktionen** die Schaltfläche **sonoGDT/WL** in **Toolbars Krankenblatt**. Wiederholen Sie dies für **PRIVAT** und **BG-FALL**.