

Anleitung zur Einrichtung von EL

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das komplette Installationsverzeichnis von sonoGDT auf dem Server mit dem Namen **sonogdt** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Server\sonogdt](#) erreicht. In den folgenden Screenshots müssen Sie in den UNC-Pfaden jeweils nur den Namen des Servers an Ihre Gegebenheiten anpassen.

Sie müssen in EL 3 Geräte konfigurieren. Gerät 1 und Gerät 2 sind als Standard verfügbar, Import3 müssen Sie über Ihren Praxisbetreuer nachordern.

Wählen Sie über das Menü **Optionen/Systemeinstellungen** und unten die Schaltfläche **Schnittstelle zu externen Geräten**.

Richten Sie Gerät 1, Gerät 2 und Import 3 nach folgenden Screenshots ein:

Gerät 1:

Station EKG : Sono Worklist

Gerät 1 Funktionsbezeichnung: Sono Worklist Schaltfläche: WL

Ausführbares Programm: \\SERVER\SONOGDT\DONOTHING.EXE

Übergabeparameter: /q

Verzeichnis für Export aus EL: \\SERVER\SONOGDT\GDT von EL erzeugte Exportdatei: sonoedv1.gdt

Verzeichnis für Import nach EL: vom Gerät gelieferte Datei:

Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü zur Verfügung stellen
(Menüpunkt: Behandlung - Schnittstellen-Import, z.B. bei Verwendung einer Worklist)

Handhabung der Patientennummer in der von EL erzeugten Exportdatei

Feldkennung für Patientennummer: 3000 (3000) EL-Nr. verkürzen (z.B. '1001' statt '001001')

ab Mandant B (Bsp.: B und EL-Nr. 1001) 1001B oder 001001B B1001 oder B001001 rein numerisch 2001001

Struktur der von EL erzeugten Exportdatei Gewicht immer ganzzahlig

GDT (ab Version 1.0)

Satzart 6301 (Patientendaten)

Satzart 6302 (Behandlung)

Zeichensatz

IBM (437) ISO 8859-1 (Ansi)

BDT (ab Version 02/94)

Zusätzlich zu Patientendaten (Satzart 6100) übergeben:

Praxisdaten (Satzart 0010)

Anforderung einer Behandlung (Satzart 6200)

Gerät 2

Station EKG : Sono Anzeige

Gerät 2	Funktionsbezeichnung	Schaltfläche
	Sono Anzeige	

Ausführbares Programm
\\SERVER\SONOGDT\GDTVIEWER.EXE

Übergabeparameter

Verzeichnis für Export aus EL
\\SERVER\SONOGDT\GDT

von EL erzeugte Exportdatei
viewedv1.gdt

Verzeichnis für Import nach EL

vom Gerät gelieferte Datei

Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü zur Verfügung stellen
(Menüpunkt: Behandlung - Schnittstellen-Import, z.B. bei Verwendung einer Worklist)


Handhabung der Patientennummer in der von EL erzeugten Exportdatei

Feldkennung für Patientennummer (3000) EL-Nr. verkürzen (z.B. '1001' statt '001001')

ab Mandant B (Bsp.: B und EL-Nr. 1001) 1001B oder 001001B B1001 oder B001001 rein numerisch 2001001

Struktur der von EL erzeugten Exportdatei Gewicht immer ganzzahlig

<input checked="" type="checkbox"/> GDT (ab Version 1.0)	<input type="checkbox"/> BDT (ab Version 02/94)
<input type="checkbox"/> Satzart 6301 (Patientendaten)	Zusätzlich zu Patientendaten (Satzart 6100) übergeben:
<input checked="" type="checkbox"/> Satzart 6302 (Behandlung)	<input type="checkbox"/> Praxisdaten (Satzart 0010)
Zeichensatz	<input type="checkbox"/> Anforderung einer Behandlung (Satzart 6200)
<input type="checkbox"/> IBM (437) <input checked="" type="checkbox"/> SO 8859-1 (Ansi)	



Import 3

Station EKG : Einstellungen Import nach EL

Funktionsbezeichnung: Import 3 | Sono Import

Schaltfläche: []

Rückgabedatei (GDT bzw. BDT): edv1 sono.*

Verzeichnis für Import nach EL: \\SERVER\SONOGDT\GDT

EL löscht ausgelesene Datei

Wiederanzeige der Untersuchung möglich durch diese Funktion: Gerät 2

Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü zur Verfügung stellen
(Menüpunkt: Behandlung - Schnittstellen-Import, z.B. bei Verwendung einer Worklist)

Struktur der vom Gerät / von der Software gelieferten Rückgabedatei

Zeichensatz: IBM (437) | ISO 8859-1 (ANSI)

Feldkennungen (FK) der Rückgabedatei

Patientennummer: 3000 (3000) | ab Mandant B (Bsp.: B und EL-Nr. 1001) | 001B oder 001001B | B1001 oder B001001 | rein numerisch 2001001

Untersuchungstyp: 8402 (8402) | Untersuchungsdatum: 8432 (8432, 6200) | Untersuchungszeit: 8439 (8439, 6201) | Weitere identifizierende FK: []

kompletten Inhalt unbearbeitet übernehmen

diese Feldkennungen auslesen (z.B. 6220, 6228, 8470, 8480) Hinzufügen

FK	Bezeichnung / Überschrift
6220	Befund
8470	Zusatzbemerkungen

ggf. feststehende ausführliche Bezeichnung der Untersuchung: []

Abspeicherung im Krankenblatt:



als Befundeintrag

Typ: sonoGDT

als Teilbefunde laut FK

als Texteintrag 'Text'

als Texteintrag 'Prx-Info'

Wählen Sie im Menü von EL Optionen/Arbeitsweise, dort rechts die **Schaltflächen Krankenblatt**

Wählen Sie zunächst **KASSE** und verschieben Sie aus der Auswahlliste **Weitere Funktionen** die Schaltflächen **Exp 1/WL** und **Imp 3/Sono** in **Toolbars Krankenblatt**. Wiederholen Sie dies für **PRIVAT** und **BG-FALL**.