

## Anleitung zur Einrichtung von EL

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das komplette Installationsverzeichnis von sonoGDT auf dem Server mit dem Namen **sonogdt** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Server\sonogdt](#) erreicht. In den folgenden Screenshots müssen Sie in den UNC-Pfaden jeweils nur den Namen des Servers an Ihre Gegebenheiten anpassen.

Sie müssen in EL 1 Gerät für die Anzeige der Daten konfigurieren. Dazu können Sie eines der Standard-Geräte 1 oder 2 verwenden. Zum Einlesen der Daten benötigen Sie eine Importfunktion, Die Sie als Import3 über Ihren Praxisbetreuer nachordern müssen. In unserem Beispiel verwenden wir Gerät 2 für die Anzeige und haben Import3 für den Datenimport nachgeordert.

Wählen Sie über das Menü **Optionen/Systemeinstellungen** und unten die Schaltfläche **Schnittstelle zu externen Geräten**.

Richten Sie Gerät 2 und Import 3 nach folgenden Screenshots ein:

### Gerät 2

**Station EKG : Sono Anzeige**

Funktionsbezeichnung: Gerät 2 | Sono Anzeige | Schaltfläche: |

Ausführbares Programm: \\SERVER\SONOGDT\GDTVIEWER.EXE

Übergabeparameter: |

Verzeichnis für Export aus EL: \\SERVER\SONOGDT\GDT | von EL erzeugte Exportdatei: viewedv1.gdt

Verzeichnis für Import nach EL: | vom Gerät gelieferte Datei: |

Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü zur Verfügung stellen  
(Menüpunkt: Behandlung - Schnittstellen-Import, z.B. bei Verwendung einer Worklist)

Handhabung der Patientennummer in der von EL erzeugten Exportdatei

Feldkennung für Patientennummer: 3000 (3000)  EL-Nr. verkürzen (z.B. '1001' statt '001001')

ab Mandant B (Bsp.: B und EL-Nr. 1001)  1001B oder 001001B  B1001 oder B001001  rein numerisch 2001001

Struktur der von EL erzeugten Exportdatei  Gewicht immer ganzzahlig

**GDT ( ab Version 1.0 )**

Satzart 6301 (Patientendaten)

Satzart 6302 (Behandlung)

Zeichensatz:  IBM (437)  SO 8859-1 (Ansi)

**BDT ( ab Version 02/94 )**  
Zusätzlich zu Patientendaten (Satzart 6100) übergeben:

Praxisdaten (Satzart 0010)

Anforderung einer Behandlung (Satzart 6200)

### Import 3

**Station EKG : Einstellungen Import nach EL**

Funktionsbezeichnung: Import 3 | Schaltfläche: Sono Import | Rückgabedatei (GDT bzw. BDT): edv1 sono.\*

Verzeichnis für Import nach EL: \\SERVER\SONOGDT\GDT

Wiederanzeige der Untersuchung möglich durch diese Funktion: Gerät 2

Import mit Patientenzuordnung im EL-Hauptmenü zur Verfügung stellen  
(Menüpunkt: Behandlung - Schnittstellen-Import, z.B. bei Verwendung einer Worklist)

---

Struktur der vom Gerät / von der Software gelieferten Rückgabedatei

Zeichensatz:  IBM (437) |  ISO 8859-1 (ANSI)

Feldkennungen (FK) der Rückgabedatei

Patientennummer: 3000 (3000) | ab Mandant B (Bsp.: B und EL-Nr. 1001):  001B oder 001001B |  B1001 oder B001001 |  rein numerisch 2001001

Untersuchungstyp: 8402 (8402) | Untersuchungsdatum: 8432 (8432, 6200) | Untersuchungszeit: 8439 (8439, 6201) | Weitere identifizierende FK: [ ]

---

kompletten Inhalt unbearbeitet übernehmen

diese Feldkennungen auslesen (z.B. 6220, 6228, 8470, 8480) Hinzufügen

FK	Bezeichnung / Überschrift
6220	Befund
8470	Zusatzbemerkungen

ggf. feststehende ausführliche Bezeichnung der Untersuchung: [ ]

Abspeicherung im Krankenblatt



als Befundeintrag

Typ: sonoGDT

als Teilbefunde laut FK

als Texteintrag 'Text'

als Texteintrag 'Prx-Info'

Wählen Sie im Menü von EL Optionen/Arbeitsweise, dort rechts die **Schaltflächen Krankenblatt**

Wählen Sie zunächst **KASSE** und verschieben Sie aus der Auswahlliste **Weitere Funktionen** die Schaltfläche **Imp 3/Sono** in **Toolbars Krankenblatt**. Wiederholen Sie dies für **PRIVAT** und **BG-FALL**.