

Einrichtung Esaote-Systeme MyLab 5,20,25,30,40,50 mit DICOM-Option für sonoGDT

- Drücken Sie die Taste [Archiv/Rev](#)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Undo Taste) auf das Festplattensymbol
- [IP-Adressen Konfiguration](#) auswählen
- Klick auf Punkt vor [Folgende IP-Adresse Benutzen](#)
- IP-Adresse: **\$USIP\$**
- Subnetzmaske: **\$SUBNETZMASKE\$**
- Standardgateway: **\$GATEWAY\$**
- **OK** anklicken, wechseln Sie mit der [Archiv/Rev](#) - Taste wieder in die Patienteneingabemaske

- Wechseln Sie ins mit der Taste [Start/End](#) oder **OK** ins Ultraschallbild, anschließend Taste [Menü](#)
- [DICOM-Konfiguration](#)
- Karteireiter [Allgemein](#): Setzen Sie den Haken bei [Kopfzeile mit Patientendaten anfügen](#)
- Karteireiter [Storage](#):
- [Anfügen](#) wählen
- Beschreibung: **sonoGDT**
- AE-Title: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
- Port-Nr.: **\$PORTSTORAGE\$**
- [Verbindung prüfen](#) anklicken
- [aktiviert](#) markieren

- Karteireiter [Worklist](#), dort [Anfügen](#) wählen
- Beschreibung: **Worklist**
- AE-Title: **US01 (US null eins, kein anderer!)**
- IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
- Port: **\$PORTWL\$**
- (alles andere belassen)
- [Verbindung prüfen](#) anklicken
- [aktiviert](#) markieren
- Karteireiter [Bericht](#): **DICOM strukturierte Berichte exportieren** markieren
- Karteireiter [Qualität](#): Für Clips **mittel** und für Bilder **hoch** einstellen.
- Unten links mit **OK** schließen und mit [Start/End](#) ins Ultraschallbild wechseln.
- Rufen Sie mit [Start/End](#) die Patienteneingabemaske auf
- Klicken Sie auf [Worklist](#), anschließend auf [Query-Parameter zeigen](#)
- Im Abschnitt [Untersuchung](#) markieren Sie nun [Alle Systeme](#), schließen Sie das Fenster.

- Wechseln Sie ins mit der Taste [Start/End](#) ins Ultraschallbild, anschließend Taste [Menü](#)
- Wählen Sie den Menüpunkt [Grundeinstellungen](#)

- Karteireiter **Archiv**: automatisches Speichern **an**, **OK**
- **Menü** Taste betätigen
- Wählen sie den Menüpunkt **Anwender-Preset**
- Hier sehen Sie alle angelegten Presets. Diese müssen editiert werden:
- Im Karteireiter **Allgemein**:
 - unter **DICOM** **sonoGDT** einstellen
 - unter **Bericht senden** **sonoGDT** einstellen
- **Speichern**, bestätigen Sie die Eingaben mit **OK**