

Einrichtung Esaote MyLab Alpha, MyLAB6, MyLAB7 mit DICOM-Option für sonoGDT

- Taste **Menü**, anschließend unter **Systemkonfiguration** den Button **Netzlaufwerk** klicken
- Wählen Sie links ein Profil, z.B. **Factory**
- Klicken Sie links unten auf **Editieren**
- Wählen Sie rechts den Karteireiter **IP-Konfiguration**
- Markieren Sie **Manuelle Konfiguration**:
 - IP-Adresse: **\$USIP\$**
 - Subnetzmaske: **\$SUBNETZMASKE\$**
 - Standardgateway: **\$GATEWAY\$**
- **Anwenden**
- Unten links **zurück zu Menü**

- Klicken Sie auf **DICOM**
- Karteireiter **Storage**:
 - **ADD** wählen
 - Beschreibung: **sonoGDT**
 - AE-Title: **sonoGDT**
 - Hostname/IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
 - Port-Nr.: **\$PORTSTORAGE\$**
- **Verification** anklicken
- **Aktiviert** markieren, anschließend **OK**

- Karteireiter **Worklist**
 - **ADD** wählen
 - Beschreibung: **Worklist**
 - AE-Title: **US01 (US null eins, kein anderer!)**
 - IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
 - Port: **\$PORTWL\$**
 - **Aktiviert**: (Haken setzen)
 - **Narrow Query**: (Haken setzen)
 - **Automatische Abfrage**: (Haken setzen)
 - **Background Query**: (Haken setzen)
 - **Refresh-Period** **(1Min)**
 - **Konfiguration** anklicken
 - **Modalität** **All**
 - (alles andere frei lassen, keine Daten bei **untersuchender Arzt** eintragen!)
 - **Verification** anklicken
 - **OK** zum Verlassen der Worklistkonfiguration
 - **OK** zum Verlassen der DICOM- Einstellungen

- Karteireiter **Qualität**
 - Links unter **DEVICE sonoGDT** anklicken
 - Rechts unten unter **Bild-Kopfzeile** den Haken setzen bei **Patientendaten zur**

Kopfzeile hinzufügen

- Taste Menü (sofern Sie nicht noch im Menü sind)
- Optionen/Speichern anklicken
- Editieren
- Lokales Archiv **automatisch speichern**
- Nativ **nichts markieren**
- Multimedia **nichts markieren**
- DICOM nur **sonoGDT** markieren
- Oben unter Patient darauf achten, dass **Anonymisieren des Eintrages** nicht markiert ist
- OK