

Einrichtung Esaote MyLab Alpha, MyLAB6, MyLAB7, Netzwerkexport für sonoGDT

- Drücken Sie die Taste **Menü**, anschließend unter **Systemkonfiguration** den Button **Netzlaufwerk** klicken
- Wählen Sie links ein Profil, z.B. **Factory**
- klicken Sie unten links auf **Editieren**, wählen Sie rechts den Karteireiter **IP-Konfiguration**
- Klicken Sie links unten auf **Editieren**, um die Werkseinstellungen zu ändern
- Markieren Sie **Manuelle Konfiguration**:
 - IP-Adresse: **IP für USGerät**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
- **Anwenden**

- Karteireiter **Netzwerk-Verzeichnisse**
- **Anfügen**
- **Beschreibung**: **sonoGDT**
- **Pfad**: **\\IP des Servers\sonoGDT\%TMP%\studies**
- **Anwendername**: **Windows-Benutzer**
- **Passwort**: **in der Praxis erfragen** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- **Aktiviert** **markieren**
- **Verification** zum Verbindungstest anklicken
- **OK**
- **zurück zum Menü**

- **Optionen/Speichern** anklicken
- **Editieren**
- **Lokales Archiv** **automatisch speichern**
- **Nativ** **nichts markieren**
- **Multimedia** nur **sonoGDT** markieren
- **DICOM** **nichts markieren**
- Oben unter **Patient** darauf achten, dass **Anonymisieren des Eintrages** nicht markiert ist
- **OK**