

Einrichtung Esaote MyLab Alpha, MyLAB6, MyLAB7, Netzwerlexport für sonoGDT

- Drücken Sie die Taste **Menü**, anschließend unter **Systemkonfiguration** den Button **Netzlaufwerk** klicken
- Wählen Sie links ein Profil, z.B. **Factory**
- klicken Sie unten links auf **Editieren**, wählen Sie rechts den Karteireiter **IP-Konfiguration**
- Klicken Sie links unten auf **Editieren**, um die Werkseinstellungen zu ändern
- Markieren Sie **Manuelle Konfiguration**:
 - IP-Adresse: **\$USIP\$**
 - Subnetzmaske: **\$SUBNETZMASKE\$**
 - Standardgateway: **\$GATEWAY\$**
- **Anwenden**

- Karteireiter **Netzwerk-Verzeichnisse**
 - **Anfügen**
 - **Beschreibung**: **sonoGDT**
 - **Pfad**: **\\\$SERVERIP\$\sonoGDT\\$TMP\$\studies**
 - **Anwendername**: **\$ACCOUNT\$**
 - **Passwort**: **\$PASSWORD\$** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
 - **Aktiviert** **markieren**
 - **Verification** zum Verbindungstest anklicken
 - **OK**
 - **zurück zum Menü**

- **Optionen/Speichern** anklicken
 - **Editieren**
 - **Lokales Archiv** **automatisch speichern**
 - **Nativ** **nichts markieren**
 - **Multimedia** nur **sonoGDT** markieren
 - **DICOM** **nichts markieren**
 - Oben unter **Patient** darauf achten, dass **Anonymisieren des Eintrages** nicht markiert ist
 - **OK**