

Konfiguration Focus & Fusion D10 mit DICOM

- Taste **Setup** (links oben, unter dem EIN/AUS Schalter)
- **Internet** (links mittig im Hauptmenü) anklicken
(Maustaste ist die SET Taste rechts neben dem Trackball)

- **Lokales TCP/IP** anklicken
- Haken setzen bei **Statische IP verwenden**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Teilnetz-Maske: **Subnetzmaske des Servers**
- Portal: **Gateway-IP**
- **Speichern**

- Menü **DICOM**
- **Local DICOM**
- PC-Bezeichnung: **USFF**

- **Server**
- AE-Titel: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- ein Klick auf **Ping** sollte einen positiven Verbindungstest liefern
- **Hinzufügen**
- **Speichern**

- **Server**
- AE-Titel: **US01** (US null eins)
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- ein Klick auf **Ping** sollte einen positiven Verbindungstest liefern
- **Hinzufügen**
- **Speichern**

- **DICOM Service**
- **Speicherung**
- AE-Titel: **sonoGDT** aus Liste auswählen
- Service Name: **sonoGDT**
- Anschluss: **105**
- alles andere so belassen
- ein Klick auf **Überprüfung** sollte einen positiven Verbindungstest liefern
- Hinzufügen, in der unteren Tabelle markieren und auf **Als Standard...** klicken
- **Speichern**

- **Arbeitsliste**
- AE-Titel: **US01** aus Liste auswählen
- Service Name: **Worklist**
- Anschluss: **104**
- alles andere so belassen

- ein Klick auf **Überprüfung** sollte einen positiven Verbindungstest liefern
- Hinzufügen, in der unteren Tabelle markieren und auf **Als Standard...** klicken
- **Speichern**

- Menü **System**
- **Benutzerdefinierte Taste**
- in der Mitte Taste **Save1** markieren
- rechts oben in den Reiter **Speicherun...** wechseln, dann Doppelklick auf **Bild auf DICOM speichern**
- **Speichern**

- Menü **System**
- **Speicherung**
- Bild-größe: **Standard Bereich**
- Bild automatisch senden: **Wenn SavingImage (Bild speichern)**
- Haken setzen bei **DICOM-Speicherung**
- **Speichern**

- **Beenden**