

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-C-Serie ohne DICOM (hier am Logiq C5 Premium)

- Taste **UTILITY** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **NETZWERK** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **TCP/IP**
- **NETZWERKKONFIGURATION**
- Haken bei **DHCP EIN** entfernen
- IP-Adresse: **\$USIP\$**
- Subnetzmaske: **\$SUBNETZMASKE\$**
- Standardgateway: **\$GATEWAY\$**
- **NETZWERKGESCHWINDIGKEIT: autom. Erkennung**
- **SPEICHERN** anklicken, das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.

- Taste **UTILITY** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- Button **NETZWERK** anklicken
- **GERÄT**, anschließend **HINZUFÜGEN** anklicken
- **NAME: sonoGDT**
- **IP-ADRESSE \$SERVERIP\$**
- **SPEICHERN** (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)

- Karteireiter **SERVICE**
- **ZIELGERÄT sonoGDT**
- In der Auswahlliste **NETWORK-STORAGE** wählen
- **HINZUFÜGEN** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **NAME** (unter Auswahlliste) **sonoGDT**
- **PASSWORD** (im rechten Fenster) **\$PASSWORD\$** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- **USER-NAME \$ACCOUNT\$** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- **SHARED DIR sonogdt/\$TMP\$/studies** (diese Freigabe ist bei der Installation von sonoGDT entstanden! Achtung! Es muss ein Slash (/) zur Trennung der Ordner verwendet werden, kein Backslash (\)! Sollten Sie die Freigabe auf diese Weise nicht erreichen, so geben Sie auf dem sonoGDT-PC den Ordner **studies** (zu finden z.B. unter C:\sonoGDT\\$TMP\$\studies) direkt mit Vollzugriff für jeden frei und tragen hier als Freigabe nur noch **studies** ein.
- **SPEICHERN**
- Den **SMILIE** zum Testen anklicken

- Karteireiter **SERVICE**
- **ZIELGERÄT MyComputer**
- **HINZUFÜGENDER SERVICETYP USB QuickSave**
- **ZIEL** (rechts unter Eigenschaften) **Network Storage**
- **DIRECTORY NAME FORMAT PatientID_LName_FName**
- **SPEICHERN**

- Karteireiter **TASTEN** anklicken
- Im linken Fenster eine Taste für den Versand der Bilder markieren
- **FORMATDICOM (*.dcm)**
- **BILDRAHMEN Sekundärerfassung**
- **ERFASSUNGSBEREICH Videobereich**
- **KOMPRESSION Keine**
- **SEITE AKTIVE BILDER Standard-Ausdruck**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **MYCOMPUTER** den Eintrag **USB Quicksave**.
- Klicken Sie auf das **>>**-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster, damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **USB-Quicksave** unter **MYCOMPUTER**

- **SPEICHERN**
- **VERLASSEN**