

## Einrichtung von GE Systemen der Logiq-C-Serie ohne DICOM (hier am Logiq C5 Premium)

- Taste **Utility** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **Netzwerk** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **TCP/IP**
- **Netzwerkkonfiguration**
- Haken bei **DHCP Ein** entfernen
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- **Netzwerkgeschwindigkeit**: **autom. Erkennung**
- **Speichern** anklicken
- Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.

- Taste **Utility** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- Button **Netzwerk** anklicken
- **Gerät**, anschließend **Hinzufügen** anklicken
- **Name**: **sonoGDT**
- **IP-Adresse** **IP des Servers**
- **Speichern** (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)

- Karteireiter **Service**
- **Zielgerät**: **sonoGDT**
- In der Auswahlliste **Network-Storage** wählen
- **Hinzufügen** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **Name** (unter Auswahlliste): **sonoGDT**
- **Password** (im rechten Fenster): **in der Praxis erfragen** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- **User-Name**: **Windows-Benutzername** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
- **Shared Dir**: **sonoGDT\%TMP%\studies**
- **Speichern**
- Den **Smilie** zum Testen anklicken

- Karteireiter **Service**
- **Zielgerät**: **MyComputer**
- **Hinzuzufügender Servicetyp**: **USB QuickSave**
- **Ziel** (rechts unter Eigenschaften): **Network Storage**
- **Directory Name Format**: **PatientID\_LName\_FName**
- **Speichern**

- Karteireiter **Tasten** anklicken
- Im linken Fenster eine Taste für den Versand der Bilder markieren
- **Format**: **DICOM (\*.dcm)**
- **Bildrahmen**: **Sekundärerfassung**
- **Erfassungsbereich**: **Videobereich**

- Kompression: **Keine**
- Seite Aktive Bilder: **Standard-Ausdruck**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **MyComputer** den Eintrag **USB Quicksave**.
- Klicken Sie auf das **>>**-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster  
damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **USB-Quicksave** unter **MyComputer**
- **Speichern**
- **Verlassen**