

Einrichtung von GE Systemen Logiq-F8 mit DICOM

- Auf dem Touchscreen Dienstprogramme wählen
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, ADM auswählen und ohne Passworteingabe auf OK klicken.
- Netzwerk in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- auf dem Monitor den Karteireiter TCP/IP anklicken
- Netzwerkkonfiguration
- **Statische IP (manuell) markieren**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- Netzwerkgeschwindigkeit: **autom. Erkennung**
- Speichern anklicken
- Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.

- Auf dem Touchscreen Dienstprogramme wählen
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, ADM auswählen und ohne Passworteingabe auf OK klicken.
- Netzwerk in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- Gerät, anschließend Hinzufügen anklicken
- Name: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Speichern (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)

- Service
- Zielgerät **sonoGDT**
- In der Auswahlliste DICOM-Bildspeicherung wählen
- Hinzufügen anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- Name: **DICOM-Bildspeicher**
- AE-Title: **sonoGDT**
- Port-Nr.: **105**
- Clips zulassen: **ja**
- Rohdaten zulassen: **nein**
- Standbildkomprimierung: **keine**
- Clipkompression: **JPEG**
- Clip Quality: **99**
- Max. Bildrate: **voll**
- Farbunterstützung: **gemischt**
- (alles andere unverändert belassen)
- Speichern
- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.

- Service
- Zielgerät **sonoGDT**
- In der Auswahlliste DICOM-Arbeitsliste wählen
- Hinzufügen anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- Name: **DICOM-Arbeitsliste**

- AE-Title: **US01** (US null eins, kein anderer!)
 - Port-Nr.: **104**
 - alles andere unverändert belassen.
 - Speichern
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
-
- Karteireiter Taste
 - Markieren Sie im linken Fenster die gewünschte Speichertaste, z.B. Druck1
 - Tragen Sie darunter ein:
 - Format: **Secondary Capture Video**
 - Kompression: **Keine**
 - Seite Aktive Bilder: **Standard-Ausdruck**
 - Markieren Sie im mittleren Fenster unter sonoGDT den Eintrag **DICOM-Bildspeicherung**.
 - Klicken Sie auf das >>-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster
 - Damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **DICOM-Bildspeicherung** unter sonoGDT
-
- Speichern