

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-F-Serie

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** anschließend **Netzwerkexport**
 - Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
 - Am Monitor: **TCP/IP** anklicken
 - **Netzwerkconfiguration**
 - Haken bei **DHCP Ein** entfernen
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
 - **Netzwerkgeschwindigkeit: autom. Erkennung**
 - **Speichern** anklicken
 - Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.
-
- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** anschließend **Netzwerkexport**
 - am Monitor: **Gerät**, anschließend **ZFG**. anklicken
 - **Name: sonoGDT**
 - **IP-Adresse: IP des Servers**
 - **Speichern:** (unten links)
 - Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)
-
- **Service**
 - **Zielgerät sonoGDT**
 - In der Auswahlliste **Network-Storage** wählen
 - **ZFG:** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
 - **Password** (im rechten Fenster) **in der Praxis erfragen** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
(Hinweis, das Passwort sollte keinen Punkt enthalten!)
 - **User-Name Windows-Benutzername** (Groß-/Kleinschreibung beachten)
 - **Shared Dir sonoGDT\STMP\studies**
 - **Speichern**
-
- immer noch auf dem Karteireiter **Service**
 - **Zielgerät: MyComputer**
 - **Hinzuzufügender Servicetyp: USB QuickSave**
 - **Ziel (rechts unter Eigenschaften): Network Storage**
 - **Directory Name Format: PatientID_LName_FName**
 - **Speichern**
-
- Karteireiter **Tasten** anklicken
 - Im linken Fenster eine Taste für den Versand der Bilder markieren (z.B. Druck1)
 - **Format: DICOM (*.dcm)**
 - **Bildrahmen: Sekundärerfassung**
 - **Erfassungsbereich: Videobereich**
 - alles andere unverändert belassen
 - **Seite Aktive Bilder: Standard-Ausdruck**
 - Markieren Sie im mittleren Fenster unter **MyComputer** den Eintrag **USB Quicksave**.
 - Klicken Sie auf das **>>**-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster

damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **USB-Quicksave** unter **MyComputer**,
zusätzlich muss **Copy to Dataflow** unter **MyComputer** zu sehen sein.

- **Speichern**
- **Verlassen**