

Einrichtung von GE Systemen Logiq-F8 mit DICOM

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **Netzwerk** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- auf dem Monitor den Karteireiter **TCP/IP** anklicken
- **Netzwerkkonfiguration**
- Haken bei **DHCP Ein** entfernen
- IP-Adresse: **IP-Adresse US-Gerät**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- **Netzwerkgeschwindigkeit: autom. Erkennung**
- **Speichern** anklicken
- Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **Netzwerk** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **Gerät**, anschließend **Hinzufügen** anklicken
- **Name: sonoGDT**
- **IP-Adresse: IP-Adresse des Servers**
- **Speichern** (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)

- **Service**
- **Zielgerät sonoGDT**
- In der Auswahlliste **DICOM-Bildspeicherung** wählen
- **Hinzufügen** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **Name: DICOM-Bildspeicher**
- **AE-Title: sonoGDT**
- **Port-Nr.: 105**
- **Clips zulassen: ja**
- **Rohdaten zulassen: nein**
- **Kompression: keine**
- **Max. Bildrate: voll**
- **Farbunterstützung: gemischt**
- (alles andere unverändert belassen)
- **Speichern**
- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.

- **Service**
- **Zielgerät sonoGDT**
- In der Auswahlliste **DICOM-Arbeitsliste** wählen
- **Hinzufügen** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **Name: DICOM-Arbeitsliste**
- **AE-Title: US01** (US null eins, kein anderer!)
- **Port-Nr.: 104**

- alles andere unverändert belassen.
- [Speichern](#)
- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.

- Karteireiter [Taste](#)
- Markieren Sie im linken Fenster die gewünschte Speichertaste, z.B. [Druck1](#)
- Tragen Sie darunter ein:
 - **Format: Secondary Capture Video**
 - **Kompression: Keine**
 - **Seite Aktive Bilder: Standard-Ausdruck**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter [sonoGDT](#) den Eintrag **DICOM-Bildspeicherung**.
- Klicken Sie auf das [>>](#)-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster
- Damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **DICOM-Bildspeicherung** unter [sonoGDT](#)

- [Speichern](#)