

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-P7/P9-Serie mit DICOM

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen
 - Falls ein Login verlangt wird, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
 - **Netzwerk** (Touchscreen unten Mitte)
 - Oben auf dem Bildschirm **TCP/IP**
 - **Netzwerkkonfiguration**
 - Haken bei **DHCP Ein** entfernen
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
 - **Netzwerkgeschwindigkeit: autom. Erkennung**
 - **Speichern** anklicken, das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.
-
- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen
 - Falls ein Login-Fenster verlangt wird, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
 - **Netzwerk** (Touchscreen unten Mitte)
 - **Gerät**, anschließend **Zfg.** anklicken
 - **Name: sonoGDT**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - **Speichern** (unten links)
 - Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)
-
- daneben Karteireiter **Service**
 - **Zielgerät: sonoGDT**
 - In der Auswahlliste **DICOM-Bildspeicherung** wählen
 - **Zfg.:** anklicken und folgende Einstellungen eintragen, alle nicht aufgeführten Einstellungen unverändert belassen:
 - **Name: DICOM - Bildspeicherung**
 - **AE-Title: sonoGDT**
 - **Port-Nr.: 105**
 - **Strukturierte Berichterstellung freigeben: ja**
 - (alles andere unverändert belassen)
 - **Speichern**
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
-
- **Service**
 - **Zielgerät: sonoGDT**
 - In der Auswahlliste **DICOM-Arbeitsliste** wählen
 - **Zfg.** anklicken und folgende Einstellungen eintragen, alle nicht aufgeführten Einstellungen unverändert belassen:
 - **Name: DICOM-Arbeitsliste**
 - **AE-Title: US01** (US null eins, kein anderer!)
 - **Port-Nr.: 104**
 - **Speichern**
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
 - Karteireiter **Taste** anwählen

- links die gewünschte Taste zum Speichern und Senden markieren, z.B. **Druck1**
- Karteireiter Standbilder: **Format secondary capture Video**
- **Kompression: Keine**
- Karteireiter Clips: **Multiframe-Dat. hinzufügen markieren**
JPEG
- **Kompression: 85**
- Karteireiter Volumen: **Format Standard DICOM**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **sonoGDT** den Eintrag **DICOM-Bildspeicherung**
- Mit dem **>>**-Symbol zwischen beiden Fenstern den Eintrag in die Ausgabeansicht verschieben
- **Speichern**
- **Verlassen**