

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-Serie mit DICOM (hier am Logiq S7)

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen
 - Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
 - auf dem Monitor nun Karteireiter **TCP/IP** anklicken
 - **Netzwerkconfiguration**
 - Haken bei **DHCP Ein** entfernen
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
 - **Netzwerkgeschwindigkeit: autom. Erkennung**
 - **Speichern** anklicken
 - Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.
-
- Taste **Utility** (untere Tastaturreihe rechts)
 - Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
 - **Netzwerk** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
 - **Gerät**, anschließend **Hinzufügen** anklicken, die automatisch eingefügten Angaben nun überschreiben:
 - **Name: sonoGDT**
 - **IP-Adresse: IP des Servers**
 - **Speichern** (unten links)
 - Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)
-
- **Service**
 - **Zielgerät sonoGDT**
 - In der Auswahlliste **DICOM-Bildspeicherung** wählen
 - **Hinzufügen** anklicken und die vorhandenen Einstellungen wie folgt überschreiben:
 - **Name: DICOM Bildspeicherung**
 - **AE-Title: sonoGDT**
 - **Port-Nr.: 105**
 - **Multiframe zulassen: ja**
 - **Rohdaten zulassen: nein**
 - **Kompression: keine**
 - **Max. Bildrate: voll**
 - **Farbunterstützung: gemischt**
 - (alles andere unverändert belassen)
 - **Speichern**
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
-
- **Service**
 - **Zielgerät sonoGDT**
 - Darunter den Pfeil neben **DICOM-Bildspeicherung** anklicken, umstellen auf **DICOM-Arbeitsliste**
 - **Hinzufügen** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
 - **Name: DICOM Arbeitsliste**
 - **AE-Title: US01** (US null eins, kein anderer!)
 - **Port-Nr.: 104**
 - **Speichern**

- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
- Karteireiter **Taste**
- Markieren Sie im linken Fenster die gewünschte Speichertaste, z.B. **Druck1**
- Lassen Sie alle Einstellungen unverändert, außer:
 - Karteireiter Standbilder: **Format secondary capture Video**
 - **Kompression: Keine**
 - Karteireiter Clips: **Multiframe-DAt. hinzufügen markieren**
 - **Kompression: 85**
 - Karteireiter Volumen: **Format Standard DICOM**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **sonoGDT** den Eintrag **DICOM Bildspeicherung**.
- Klicken Sie auf das **>>**-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster
- damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **DICOM Bildspeicherung** unter **sonoGDT**
- **Speichern**
- **Verlassen**