

## Einrichtung von GE Systemen der Logiq-Serie mit DICOM (hier am Logiq P5)

- Taste **UTILITY** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passwortheingabe auf **OK** klicken.
- **NETZWERK** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **TCP/IP**
- **NETZWERKKONFIGURATION**
- Haken bei **DHCP EIN** entfernen
- IP-Adresse: **IP\_ULTRASCHALLGERÄT**
- Subnetzmaske: **SUBNETZMASKE**
- Standardgateway: **GATEWAY**
- **NETZWERKGESCHWINDIGKEIT**: **autom. Erkennung**
- **SPEICHERN** anklicken, das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.
  
- Taste **UTILITY** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passwortheingabe auf **OK** klicken.
  
- **NETZWERK** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **GERÄT**, anschließend **HINZUFÜGEN** anklicken, die automatisch eingefügten Angaben nun überschreiben:
- **NAME**: **sonoGDT**
- **IP-ADRESSE** **IP\_SERVER**
- **SPEICHERN** (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)
  
- **SERVICE**
- **ZIELGERÄT** **sonoGDT**
- In der Auswahlliste **DICOM-BILDSPEICHERUNG** wählen
- **HINZUFÜGEN** anklicken und die vorhandenen Einstellungen wie folgt überschreiben:
- **NAME** **DICOM Bildspeicherung**
- **AE-TITLE** **sonoGDT**
- **PORT-NR.** **105**
- **MULTIFRAME ZULASSEN** **ja**
- **ROHDATEN ZULASSEN** **nein**
- **KOMPRESSION** **keine**
- **MAX. BILDRATE** **voll**
- **FARBUNTERSTÜTZUNG** **gemischt**
- (alles andere unverändert belassen)
- **SPEICHERN**
- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
  
- **SERVICE**
- **ZIELGERÄT** **sonoGDT**
- Darunter den Pfeil neben **DICOM-BILDSPEICHERUNG ANKLICKEN UND** umstellen auf **DICOM-ARBEITSLISTE**
- **HINZUFÜGEN** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **NAME** **DICOM Arbeitsliste**
- **AE-TITLE** **US01** (US null eins, kein anderer!)
- **PORT-NR.:** **104**
- **SPEICHERN**
- Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
  
- Karteireiter **TASTE**
- Markieren Sie im linken Fenster eine Taste, bei deren Druck das DICOM-Bild gesendet werden soll, z.B. **DRUCK2**
- Tragen Sie darunter ein:
- **FORMAT** **DICOM (\*.dcm)**
- **BILDRAHMEN** **Sekundärerfassung**
- **ERFASSUNGSBEREICH** **Videobereich**

- KOMPRESSION **Keine**
- EINZELNE ZUS.STELLUNG **Nein**
- SEITE AKTIVE BILDER **Standard-Ausdruck**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **SONOGDT** den Eintrag **DICOM Bildspeicherung**.
- Klicken Sie auf das >>-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster, damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **DICOM Bildspeicherung** unter **SONOGDT**
- **SPEICHERN**
- **VERLASSEN**