

## Einrichtung von GE Systemen der Vivid S60, S70, Vivid T8, T9, Vivid E90, E95

- Auf dem Touchscreen **Dienstprogramme** wählen (**Zahnrad** oben rechts)
- Konfiguration (**Konfig**)
- **Connectivity** (Bildschirm oben)
- Karteireiter **TCP/IP**
- am unteren Bildschirmrand auf **Netzwerkeinstellungen** klicken (ggf. runter scrollen)
- **Local Area Connection** doppelt klicken
- **Eigenschaften** wählen
- **Internet Protocol (TCP/IP)** doppelklicken
- Klick auf Punkt vor **Folgende IP-Adresse verwenden**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- Bevorzugter DNS-Server: **Gateway-IP**
- mit **OK** bestätigen
- auf **Einst. Sichern** klicken
- rechts unter Server-Konfig **Hinzufügen** wählen
- Name: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- **OK**
  
- Karteireiter **Datenfluss**
- Aus der Auswahlliste wählen Sie **Worklist/Local Archive – DICOM-Server/Int. HD**
- In der Box unter Outputs markieren Sie den Eintrag **DICOM Storage**
- Klicken Sie nun rechts davon auf **Einstellungen**
- Wählen Sie unter IP-Adresse **sonoGDT** aus der Auswahlliste, tragen Sie folgende DICOM-Storage Eigenschaften ein (nicht aufgeführte Einstellungen bitte belassen):
- Name: **sonoGDT**
- AE-Title: **sonoGDT**
- Port-Nr.: **105**
- Unter Bildeinstellungen:
- Max Bildrate **full**
- Kompression **JPEG**
- Qualität **95**
- Multiframe **markieren**
- Unter DICOM SR Einstellungen
- SR Erlauben **markieren**
- SR Private Data erlauben **markieren**
- Alles andere unverändert belassen, **OK** zum Schließen
- Klicken Sie auf **Prüfen**, die Tests sollten erfolgreich sein
  
- Sie sind nun wieder im Datenflussfenster, in der Box unter **Inputs** markieren Sie den Eintrag **DICOM Worklist**
- Klicken Sie rechts davon auf **Einstellungen**
- Wählen Sie **sonoGDT** aus der Auswahlliste, tragen Sie folgende DICOM-Arbeitslisten Eigenschaften ein:

- Name: **Worklist**
- AE-Title: **US01** (US null eins, kein anderer!)
- Port-Nr.: **104**
- OK zum Schließen
- Klicken Sie auf **Prüfen**, die Tests sollten erfolgreich sein
  
- Markieren Sie oben rechts die Konfiguration als **Standard**
- **Direkt speichern nicht markieren**
- **Versteckt** darf **nicht markiert** werden!
  
- Prüfen Sie auf dem Karteireiter **DICOM**, dass unter **DICOM Bilder** der Punkt **Kopfzeile hinzufügen** angeklickt ist (für die Patientendaten im Bild)
- Verlassen Sie die Einstellungen durch Drücken des 2D-Bildknopfes