

Einrichtung von GE Systemen der Voluson-730 Serie mit DICOM-Option

- Taste UTIL
 - F2: SYSTEM
 - Karteireiter NETZWERK
 - NETZWERKKONFIGURATION
 - Klick auf Punkt vor USE THE FOLLOWING IP-ADRESS
 - IP-Adresse: IP_ULTRASCHALLGERÄT
 - Subnetzmaske: SUBNETZMASKE
 - Standardgateway: GATEWAY
 - OK anklicken
-
- Karteireiter DICOM SONOVIEW KONFIGURATION
 - Die Einstellungen im oberen Bereich können beibehalten werden
-
- am unteren Bildschirmrand HINZUFÜGEN anklicken
 - SERVICE Store
 - ALIAS sonoGDT
 - IP-ADRESSE: IP_SERVER
 - PORT-NR. 105
 - AE-TITLE sonoGDT
 - OK
-
- Am unteren Bildschirmrand HINZUFÜGEN anklicken
 - SERVICE Worklist
 - ALIAS Worklist
 - IP-ADRESSE: IP_SERVER
 - PORT-NR. 104
 - AE-TITLE US 01 (US null eins, kein anderer!)
 - OK