

Einrichtung von GE Systemen der Voluson-730 Serie ohne DICOM-Option

- Taste UTIL
- F2: SYSTEM
- Karteireiter NETZWERK
- NETZWERKKONFIGURATION
- Klick auf Punkt vor FOLGENDE IP-ADRESSE VERWENDEN
- IP-Adresse: \$USIP\$
- Subnetzmaske: \$SUBNETZMASKE\$
- Standardgateway: \$GATEWAY\$
- OK anklicken

- NETZLAUFWERK VERBINDEN anklicken
- NETZWERKORDNER-NAME \\\$SERVERIP\$\sonoGDT\TMP
\$\studies
- BENUTZERACCOUNT \$ACCOUNT\$
- PASSWORT \$PASSWORD\$
- AUTOMATISCH WIEDER VERBINDEN Ja
- VERBINDEN
- OK

Die Voluson-Geräte können eine DICOM-Worklist auch dann abrufen, wenn keine DICOM-Option installiert ist, daher jetzt noch die Konfiguration für die Worklist vornehmen:

Karteireiter DICOM SONOVIEW KONFIGURATION

- Die Einstellungen im oberen Bereich können beibehalten werden
- Am unteren Bildschirmrand HINZUFÜGEN anklicken
- SERVICE Worklist
- ALIAS Worklist
- IP-ADRESSE: \$SERVERIP\$
- PORT-NR. \$PORTWL\$
- AE-TITLE US01 (US null eins, kein anderer!)
- OK UND VERLASSEN