

### Einrichtung von GE Systemen der Voluson-Serie ohne DICOM-Option (hier am Voluson S8)

- Taste **UTILITY** (rechts über Tastatur)
- **SYSTEMEINRICHTUNG** anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **NETZWERK**
- Karteireiter **GERÄTESETUP**
- **NETZWERKKONFIGURATION**
- Klick auf Punkt vor **USE THE FOLLOWING IP-ADRESS**
- IP-Adresse: **USIP**
- Subnetzmaske: **SUBNETZMASKE**
- Standardgateway: **GATEWAY**
- **OK** anklicken
  
- Karteireiter **LAUFWERKE**
- **NETZLAUFWERK VERBINDEN**
- **LAUFWERKSNUMMER** (freies Laufwerk wählen, z.B. **NW DRIVE 1**)
- **NAME NETZWERKORDNER:** **\\SERVERIP\sonoGDT\%TMP%\studies**
- **BENUTZER** **ACCOUNT**
- **KENNWORT** **PASSWORD**
- **AUTOMATISCHE VERBINDUNGSWIEDERHERSTELLUNG** **ja**
- **VERBINDEN**

Bei den Voluson Softwareversionen bis einschließlich BT11 können Sie die Bilder nach Abschluss der Untersuchung aus dem lokalen Archiv des Gerätes versenden. Ab Softwareversion BT12 gibt es die Möglichkeit, eine Taste zu konfigurieren, um die Daten direkt beim Speichern zu übertragen:

- Karteireiter **TASTENKONFIGURATION**
- Oben die gewünschte Taste auswählen, z.B. **P1**
- Unter **EXPORT** setzen Sie den Haken bei **EXPORT AS JPG/AVI**
- Aus der Auswahlliste wählen Sie Ihre für den Export konfigurierte Laufwerksnummer (z.B. **NW DRIVE 1**)
- **SPEICHERN UND BEENDEN**

Die Voluson-Systeme können eine DICOM-Worklist auch dann abrufen, wenn die DICOM-Option nicht installiert ist:

- Karteireiter **GERÄTESETUP**
- **DICOM-KONFIGURATION**, anschließend **ADD**
- Unter **SERVICES Worklist** auswählen
- **IP-ADRESSE:** **SERVERIP**
- **ALIAS** **Worklist**
- **PORT-NR.:** **PORTWL**
- **PRIVATE TAGS** **nein**
- **AE-TITLE:** **US01** (US null eins, kein anderer!)
- **MODALITY** **Ultrasound**
- **ADD LOCAL DATA** **yes**
- **SAVE & EXIT**
- Zum Testen des Worklistservers diesen in der Liste der Services markieren und auf **TEST CONNECTION** klicken.
- Ist der Test erfolgreich, die Checkbox zu Beginn der Zeile **WORKLIST** markieren
  
- Die Konfiguration links unten mit **SPEICHERN UND BEENDEN** abschliessen