

Konfiguration für Hitachi Ultraschallsysteme mit DICOM

- Taste **Pointer** drücken
- am Bildschirm links unten auf **Setup** klicken
- im Menü oben links auf **System** klicken
- im Menü **System Settings** unter **Network** auf **Adapter1** klicken
- unter **IP Address** klicken auf **Specify an IP address**
- **IP Address**: IP des US-Gerätes
- **Subnet Mask**: Subnetzmaske des Servers
- **Default Gateway**: Gateway-IP
- **OK**

- Menüpunkt **Filing**
- im Menü **Setup Filing** unter **Filing** -> **Common** -> **Details** unter **Timing of Transfer** den Punkt setzen bei **Every image**

- unter **DICOM** auf **DICOM Server** klicken

- **Service**: Storage Server
- **Name**: sonoGDT
- **AE Title**: sonoGDT
- **IP**: IP des Servers
- **Port**: 105
- **Timeout**: 5 s
- Haken bei **Echo**
- **Register** anklicken
- unter **Server List** den **Storage Server** anklicken und dann auf **Connection Check** klicken
- **Apply**

- **Service**: MWM Server
- **Name**: Worklist
- **AE Title**: US01
- **IP**: IP des Servers
- **Port**: 105
- Haken bei **Echo**
- **Register** anklicken
- unter **Server List** den **MWM Server** anklicken und dann auf **Connection Check** klicken
- **Apply**

- **OK**