

Anleitung zur Einrichtung von Interdata für Ultraschall-Geräte mit DICOM-Worklist

Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das komplette Installationsverzeichnis von sonoGDT auf dem Server mit dem Namen **sonogdt** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter [\\Server\sonogdt](#) erreicht.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü von InterARZT **Stammdaten**, anschliessend **asynchrone Anbindungen**. Wählen Sie mit **F3** eine Neuanlage. Sie benötigen einen Key für Neuanlage, den Sie bei der Interarzt-Hotline kostenlos erhalten.

Füllen Sie in der Maske nur folgende Felder aus, alle anderen belassen Sie, wie vorhanden. Ersetzen Sie in den UNC-Pfaden dabei den Namen Server durch den Namen des Rechners, auf dem sonoGDT freigegeben wurde:

Kommentar:	sonoGDT
Importpfad/Maske:	\\Server\sonoGDT\GDT\edv1sono.*
Zeichensatz:	ANSI/Windows
Exportdatei:	\\Server\sonoGDT\GDT\viewedv1.gdt
Programmstart:	\\Server sonoGDT\GDTViewer.exe
Identifikation der Patienten:	Nummer
Originaldatei verwerfen:	nicht markieren
Beschriftung:	Sonografie
Verzögerungszeit:	30 sec.

Speichern Sie die Einstellungen.

Drücken Sie aus der Karteikarte eines Patienten **F8**, wählen Sie einen noch nicht belegten Platz, drücken Sie **Alt+F11** und anschließend zur Neuanlage **F3**. Vergeben Sie als Kürzel **WL**, als Beschreibung **Worklist** und tragen Sie unter **Prg** die Zahl **182** ein, als Zusatz tragen Sie **sonoGDT** ein. Drücken Sie anschließend **F4** und füllen Sie folgende Maske wie folgt aus, ersetzen Sie in den UNC-Pfaden dabei den Namen Server durch den Namen des Rechners, auf dem sonoGDT freigegeben wurde:

Exportdatei:	\\Server\sonoGDT\GDT\sonoedv1.gdt
Export-Format:	GDT(6302)
Export Zeichensatz:	ANSI/Windows
Aufzurufendes Programm:	\\server\sonoGDT\
Beschriftung:	Sonographie

Ihr Workflow gestaltet sich wie folgt:

Öffnen Sie die Karteikarte eines Patienten, drücken Sie **F8** und wählen Sie die Nummer für den Eintrag Worklist.

Nach der Untersuchung erscheint bei einem Klick in die Karteikarte automatisch der Eintrag, ein Doppelklick auf den Eintrag öffnet die Bilder.