

Anleitung zur Einrichtung von MEDISTAR

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

- Geben Sie in medistar **PSH** (Enter) ein, starten Sie dann über **fasm** den Formulareditor, drücken Sie ENTER und wählen Sie aus der Liste das Formular **MS3.IO_XDT** auf. Gehen Sie auf **Bearbeiten** und ergänzen Sie folgende Angaben in eine freie Stelle:
Label_1 **sonoGDT**
Name_1 **SONO**
Untersart_1 **SONO00**
Satzart_1 **6302**
Ziffer_1 **(frei lassen)**
- Speichern Sie mittels **ESC** und **Ja**, markieren Sie dann noch einmal Formularcode Einlesen und drücken Sie **ENTER**
- Sie stehen nun wieder in der Kommandozeile, die Sie über PSH aufgerufen haben.
- Starten Sie von dort die Konfiguration des XDT-Servers mittels **ga_xdt**, Wählen Sie **Geräte-Setup**.
- Klicken Sie oben links auf **Setup**, anschließend auf darunter auf **Importieren** und wählen Sie die Datei **SONO.xdt.Setup**, welche Sie über den Schnelleinstellungs-Button zuvor erzeugt und gespeichert haben. Schließen Sie das Einrichtungsfenster.
- Erstellen Sie für den Formularaufruf einen Makrobutton mit der Bezeichnung **Worklist**.
- Achten Sie darauf, den XDT_Server in den Autostart des Servers zu legen, damit er künftig immer automatisch gestartet wird.

Workflow:

- Klicken Sie auf den **Worklist-Button**, um eine Untersuchung anzumelden.
- Zur Kontrolle öffnet sich ein Fenster mit der aktuellen Worklist, welches Sie mit Enter wieder schließen können.
- Rufen Sie am Ultraschallsystem die Worklist ab und wählen Sie Ihren Patienten aus der Liste. Es werden ID, Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Größe und Gewicht aus Ihrer Praxissoftware übernommen.
- Untersuchen Sie Ihren Patienten und beenden Sie die Untersuchung.
- Der XDT-Server verarbeitet die zurückgegebenen Dateien zu einem Eintrag in der Karteikarte
- Mit eine Doppelklick auf diese Zeile können Sie die Bilder öffnen.

	UA:
25.08.2008	Y 03 END -1 /LG/ 25.08.08 Y R-CRP=0.1; R-RF=<20; FER=162.0; R-CCP=0,31; ANA=1:160fgr+nuc Y ENA-PI=1.4; NcX=<10; HLA; R-ASL=25; ChlaA=0,26; ChlaG=0,20 Y Bei G=0,09; Bei M=1,79; VcrA=5.9 +; Vcr G=5.5 +
16.05.2011	S XD:SONOGDT.SONO00 16.05.2011 #16.05.2011 16:18:59