

Anleitung zur Einrichtung von MEDISTAR

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:


- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

- Geben Sie in medistar **PSH** (Enter) ein, starten Sie dann über **fasm** den Formulareditor, drücken Sie ENTER und wählen Sie aus der Liste das Formular **MS3.IO_XDT** auf. Gehen Sie auf **Bearbeiten** und ergänzen Sie folgende Angaben in eine freie Stelle:
Label_1 sonoGDT
Name_1 SONO
Untersart_1 SON000
Satzart_1 6302
Ziffer_1 (frei lassen)
- Speichern Sie mittels **ESC** und **Ja**, markieren Sie dann noch einmal Formularcode Einlesen und drücken Sie **ENTER**
- Sie stehen nun wieder in der Kommandozeile, die Sie über PSH aufgerufen haben.
- Starten Sie von dort die Konfiguration des XDT-Servers mittels **ga_xdt**,
- Klicken Sie oben links auf **Setup**, anschließend auf darunter auf **Importieren** und wählen Sie die Datei **SONO.xdt.Setup**, welche Sie über den Schnelleinstellungs-Button zuvor erzeugt und gespeichert haben. Schließen Sie das Einrichtungsfenster.
- Achten Sie darauf, den XDT_Server in den Autostart des Servers zu legen, damit er künftig immer automatisch gestartet wird.

Workflow:

- Geben Sie am Ultraschallsystem die Patientendaten inklusive der Patientennummer aus medistar manuell ein.
- Untersuchen Sie Ihren Patienten und beenden Sie die Untersuchung.
- Der XDT-Server verarbeitet die zurückgegebenen Dateien anhand der zuvor eingegebenen Patientennummer zu einem Eintrag in der Karteikarte

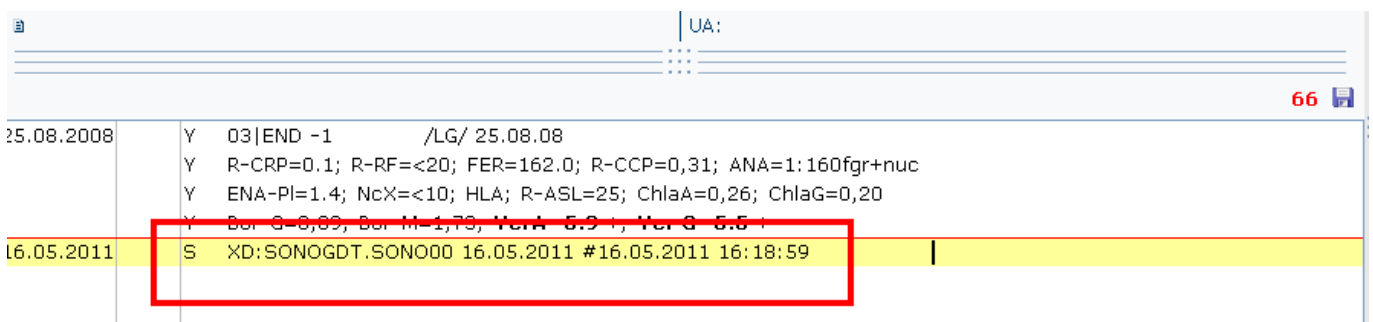

The screenshot shows a software interface with a table of patient data. The table has columns for dates and text entries. The entry for 16.05.2011 is highlighted in yellow and enclosed in a red box. The entry text is 'S XD:SONOGDT.SON000 16.05.2011 #16.05.2011 16:18:59'. The interface also shows a 'UA:' field at the top right and a page number '66' in the bottom right corner.

Date	Text
25.08.2008	Y 03 END -1 /LG/ 25.08.08 Y R-CRP=0.1; R-RF=<20; FER=162.0; R-CCP=0,31; ANA=1:160fgr+nuc Y ENA-PI=1.4; NcX=<10; HLA; R-ASL=25; ChlaA=0,26; ChlaG=0,20 Y Bor G=0,89; Bor M=1,79; Ver A=5.9 +; Ver G=5.5 +
16.05.2011	S XD:SONOGDT.SON000 16.05.2011 #16.05.2011 16:18:59