

Einrichtung Mindray-Ultraschallsystemen mit DICOM-Option für sonoGDT

- Drücken Sie Taste **F10 (SETUP)** (Tastatur, obere Reihe)
- **DICOM VOREIN.** (links) wählen und mit der SET-Taste (Nähe Trackball) bestätigen
- Karteireiter **LOK.TCP/IP**
- **STAT.IP Haken setzen**
- **IP-ADRESSE: IP des US-Gerätes**
- **SUBNETZMASKE: Subnetzmaske des Servers**
- **STANDARDGATEWAY: Gateway-IP**
- **DNS-SERVER** (kann frei bleiben)
- **ANWENDEN** (rechts neben DNS-Server)
- **SPEICHERN**

- Unter **DICOM-VOREIN.**(stellungen)
- **AE-TITEL** (unverändert lassen)
- **PORT-NR.** (unverändert lassen)
- **PDU** (unverändert lassen)

- Unter **SERVER-EINST.:**
- **GERÄT sonoGDT**
- **IP-ADRESSE: IP des Servers**
- **PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- **HINZUFÜGEN** anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste

- In der Geräteliste zuerst **SONOGDT** markieren, **DICOM DIENST EIN** richten anklicken
- Karteireiter **SPEICHER:**
- **GERÄT sonoGDT** (unverändert lassen)
- **AE-TITLE sonoGDT**
- **PORT-NR. 105**
- **FARBMODUS Farbe**
- **KOMPRIMIR.MODUS JPEG**
- **KOMPRESSIONSVERH. mittel**
- **MULTIFRAME ZULASS. Haken setzen**
- **MAX. FRAMERATE full**
- **HINZUFÜGEN**, anschließend **SONOGDT** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
- **PRÜFEN** anklicken.
- **STAND.(ard)** anklicken, damit ist dies das Standardziel beim Speichern

- Karteireiter **WORKLIST:**
- **GERÄT sonoGDT**
- **AE-TITLE US01** (kein anderer! Groß-Kleinschreibung beachten)
- **PORT-NR. 104**
- **HINZUFÜGEN**, anschließend **WORKLIST** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
- **PRÜFEN** anklicken
- **STAND.(ard)** anklicken, damit ist dies die Standard-Worklist
- **ENDE** anklicken

- **SETUP** anklicken
- **SYSTEMVOREINSTELLUNGEN**
- Karteireiter **TASTENKONF**
- Links Taste **SAVE** markieren, rechts unter **AUSGABE Bild auf Festplatte speichern und Senden an DICOM** wählen (sinngemäß)