

Einrichtung des Netzwerkexports von Mindray-Ultraschallsystemen für sonoGDT

- Installieren Sie zuerst sonoGDT gemäß dieser http://sonogdt.de/fileadmin/files/sonogdt/Installation_und_Konfiguration_von_sonoGDT.pdf auf dem Server
- Installieren Sie anschließend ebenfalls auf dem Server die kostenlose Software **ULTRAASSIST** von Mindray
- Starten Sie **UltraAssistent.exe**, erlauben Sie der Firewall bei Nachfrage den Zugriff
- Wählen Sie im UltraAssist-Programm den Menüpunkt Settings/Network Storage
- MACHINE NAME:** **Mindray** (z.B.)
- IP-ADRESSE:** **\$USIP\$**
- DIRECTORY:** **C:\sonoGDT\%TMP%\studies**
(der Ordner ...%\\$TMP%\studies im Installationsverzeichnis von sonoGDT)
- OK** und **EXIT**
- Ultraassist muss immer gestartet sein, damit das Mindray-System Daten ohne DICOM-Option exportieren kann, legen Sie es deshalb am besten in den Autostartordner von Windows!

- Drücken Sie **SETUP** am Ultraschallsystem (oberste Tastaturreihe)
- NETZWERKVOREINSTELLUNGEN** (links im Menü, Maustaste ist in der Nähe des Trackballs)
- Karteireiter **LOK. TCP/IP**
- STAT.IP** **Haken setzen**
- IP-ADRESSE:** **\$USIP\$**
- SUBNETZMASKE:** **\$SUBNETZMASKE\$**
- STANDARDGATEWAY:** **\$GATEWAY\$**
- DNS-SERVER** (kann frei bleiben)
- ANWENDEN** (rechts neben DNS-Server)

- Karteireiter **ISTORAGE**
- DIENSTNAME** **sonoGDT**
- IP-ADRESSE:** **\$SERVERIP\$**
- VERBIND...** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen. Dazu muss **ULTRAASSIST** auf dem Server-PC gestartet sein. Wenn keine Verbindung möglich ist, bitte prüfen, ob in der Windows-Firewall eine Ausnahme für das Programm Ultraassist (iStorage) eingetragen ist.