

Einrichtung des Netzwerkexports von Mindray-Ultraschallsystemen für sonoGDT

Wenn Sie diese Anleitung erhalten, ist sonoGDT und auch Ultraassist bereits in der Praxis installiert. Sie müssen also nur noch die Konfiguration im Ultraschallsystem herstellen. Achtung, in der Regel wird Ultraassist von mir Hintergrunddienst installiert, Sie sehen also nicht, wie sonst gewohnt, unten rechts das Icon!

Konfigurieren Sie nur das Ultraschallgerät wie folgt:

- Drücken Sie Setup (Tastatur, obere Reihe)
- Netzwerkvoreinstellungen (links) wählen und mit der SET-Taste (Nähe Trackball) bestätigen
- Karteireiter Lok.TCP/IP
- **Statische IP (manuell) markieren**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- DNS-Server (kann frei bleiben)
- Anwenden (rechts neben DNS-Server)
- Speichern

- Karteireiter IStorage
- Dienstname: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port: **4000**
- Verbind... anklicken
- SPEICH anklicken zum Speichern der Einstellungen.

- Um die Bilder nach der Untersuchung zu senden, drücken Sie die Taste iStation in der oberen Tastaturreihe
- Klicken Sie den untersuchten Patienten an und wählen Sie **Send** und danach **iStorage**