

Anleitung zur Einrichtung von Nephro7 ohne Medienarchiv-Sourcepack

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

Öffnen Sie über das Menü den Punkt **Konfiguration/Externe Programme**

Klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen einer externen Anwendung




Konfigurieren Sie die Externen Anwendungen wie folgt, passen Sie dabei den Namen Ihres Servers an:

Für die Worklist:

Anwendung	Externe Anwendung
Name	Worklist
Dateiname	showworklist.exe
Computer	PC-ARZT
Dateipfad	\\server-db01\sonogdt
Parameter	/nephro7 /ID=#Patient.Nummer# /Name=#Patient.Name#

Zeige Symbol im Hauptfenster

Für den Anzeige der Bilder:

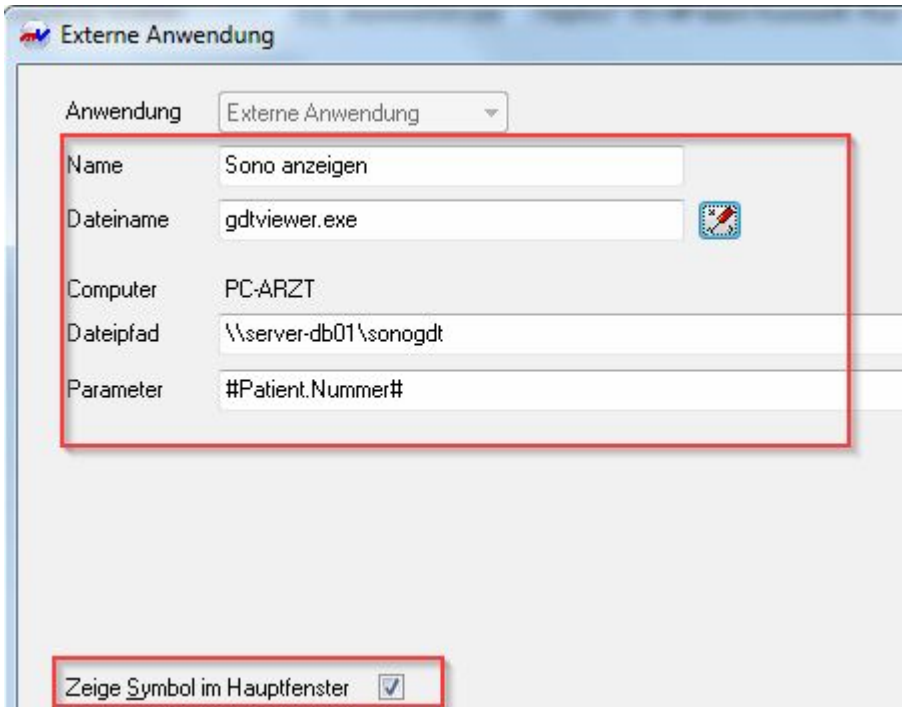

hr Workflow gestaltet sich wie folgt:

Rufen Sie den zu untersuchenden Patienten auf, wählen Sie das Symbol für externe Programme aus der Menüleiste und anschließend die gewünschte Funktion, also **Worklist**, um den Patienten zum Ultraschallsystem zu senden und **Sono anzeigen** um die Bilder anzuzeigen.

