

Anleitung zur Einrichtung von Praxis4more

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor


Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:

Öffnen Sie in P4M über das Menü **Einstellungen/Optionen/Kommunikation/GDT-Geräte** und erstellen Sie ein neues GDT-Profil:

GDT-Profil bearbeiten

Schnittstellename

Name:

Kürzel: 

Eintragstyp:

Ausgabedatei (von P4M an externes Programm/Gerät)

Pfad:

Name:

Dateiendung: GDT fortlaufend numerisch Selbstdefiniert

Untersuchungstypen (durch Semikolon getrennt):

Ausgabezeitpunkt (Schreiben der Ausgabedatei)

Auf Befehl (Standardeinstellung) Bei jedem Patientenwechsel

Rückgabedatei (vom externen Programm/Gerät an P4M)

Pfad:

Name:

Dateiendung: GDT fortlaufend numerisch Selbstdefiniert

zu startendes Programm

Pfad:

Aufrufparameter:

Kodierung der Im- und Export-Datei

Kodierung:

Öffnen Sie immer noch unter **Optionen** die Patientenverwaltung und setzen Sie den Haken bei sonoGDT. Dies müssen Sie separat an jedem Arbeitsplatz tun, an dem Sie die Schnittstelle verwenden wollen!

Speichern und Schließen Sie die Optionen.

- Ändern Sie in sonoGDT den Gdt-Pfad auf **C:\VFA\GDT**
- Öffnen Sie die settings.ini und fügen Sie unter Parameter folgende Zeile ein, passen Sie dabei den Servernamen entsprechend an:


WLGDTVerzeichnis= \\Server\sonoGDT\GDT

Suchen Sie in der settings.ini den Eintrag **[Tool1]**, passen Sie darunter im UNC-Pfad für **WLGDTDateiname** ebenfalls den Servernamen an Ihre Gegebenheiten an.

Markieren Sie in sonoGDT_Diagnose, Spezialkonfiguration unter **GDT** den Haken bei **keine GDT-Datei erzeugen**.

Workflow:

Öffnen Sie einen Patienten, unter dem Karteireiter **Patient** finden Sie rechts oben die GDT-Anbindungen, mit der linken Anbindung erzeugen Sie den Auftrag, also die Worklist.

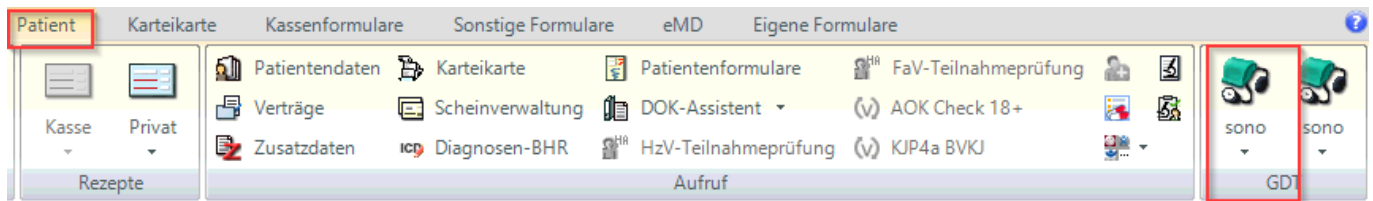

Der Klick darauf erzeugt gleichzeitig den Eintrag in der Patientenkartei.

Typ	Eintrag
22.03.2019 (1 Eintrag)	
Befund	Sonographie

Zum Anschauen der Bilder klicken Sie rechts auf Sono.

