

Anleitung zur Einrichtung von Quincy

Allgemeine vorbereitende Maßnahmen:

- Folgen Sie der Anleitung zur Installation von sonoGDT auf dem Server-PC. Im Rahmen der Installation wird das Installationsverzeichnis mit dem Namen **sonoGDT** freigegeben, so dass es nun jeder Benutzer unter `\\Server\sonoGDT` erreicht.
- Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, klicken Sie dort auf **Spezial-Konfiguration** und setzen Sie auf dem Tabellenreiter **Praxissoftware** Ihre Einstellungen entsprechend Ihren Gegebenheiten.
- Unter Punkt 6. (Schnelleinstellungen) nehmen Sie dann die Schnellkonfiguration vor

Spezifische Einstellungen für Ihre Praxissoftware:


- Wenn Sie zuvor unter 5. den Pfad zu Ihrem Quincy-Ordner eingestellt haben, wurden die GDT-Importdateien im Quincy\Windata-Verzeichnis gespeichert.

An jedem Quincy-Arbeitsplatz importieren Sie nun diese Dateien wie folgt:

- Rufen Sie über das Menü **Kartei/Wechsel** zu anderen Programmen auf
- Im folgenden Fenster wählen Sie **Menü/Definition von Programmanschlüssen**
- Positionieren Sie den Cursor in der nächsten freien Zeile und klicken Sie in der Mitte unten unter **neuer Anschluss** auf den Button **GDT**
- Klicken Sie unten auf den Button **Vorlage laden** und laden Sie die zuvor erzeugte Datei **GDT_Sonographie_Worklist_erstellen.txt**, sie befindet sich im Verzeichnis Quincy\Windata
- Klicken Sie in der Quincy-Maske rechts unten auf Speichern
- Positionieren Sie den Cursor in der nächsten freien Zeile und klicken Sie in der Mitte unten unter **neuer Anschluss** erneut auf den Button **GDT**
- Klicken Sie unten auf den Button **Vorlage laden** und laden Sie die Datei eingangs erzeugte Datei **GDT_Ultraschalluntersuchung.txt**
- Suchen Sie in der vorausgefüllten Maske nach dem Eintrag **Importverzeichnis, ggf. vollständiger Importdateiname**. Der in dieser Zeile hinterlegte Eintrag darf nur an einem einzigen Arbeitsplatz (!) in der Praxis bestehen bleiben! Dies muss ein PC sein, der während des Praxisbetriebes läuft und an dem Quincy gestartet ist (z.B. Anmeldung). Dieser PC sorgt dafür, dass die GDT-Dateien zu Karteizeilen verarbeitet werden. Löschen Sie unbedingt an allen anderen Arbeitsplätzen den Inhalt dieser Zeile vor dem Speichern, da es zu Fehlfunktionen bei Quincy kommen kann, wenn mehr als ein Platz versucht, diese Datei zu importieren.
- Klicken Sie in der Quincy-Maske rechts unten auf Speichern
- Wählen Sie unten **Schaltflächen** und erstellen Sie für jede der beiden Funktionen eine Schaltfläche, passende Icons finden Sie im sonoGDT-Installationsverzeichnis im Ordner ICON
- Nach einem Quincy-Neustart stehen die Icons in der Karteikarte rechts zur Verfügung.

Workflow:

- Drücken Sie **F4** zum Start von Fremdprogrammen und wählen Sie aus der Liste unseren definierten Anschluss **Sonographie Worklist erstellen** oder klicken Sie auf die dafür zugeordnete Schaltfläche. Damit erzeugen Sie den Eintrag für die Worklist im Ultraschallgerät.
- Zur Kontrolle öffnet sich für 2 Sekunden ein Fenster mit der aktuellen Worklist.
- Rufen Sie am Ultraschallsystem die Worklist ab und wählen Sie Ihren Patienten aus der Liste.
- Untersuchen Sie Ihren Patienten und beenden Sie die Untersuchung.
- In Quincy erscheint nach kurzer Zeit ein entsprechender Eintrag.

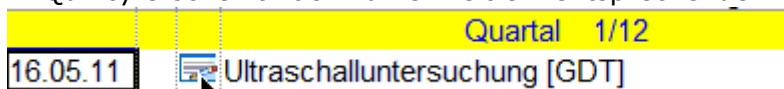

- Ein Klick auf das Symbol vor dem Eintrag öffnet ein Fenster, dort finden Sie rechts unten eine Schaltfläche, über die Sie die Bilder anzeigen können.
- Klicken Sie auf das Symbol des Eintrages, um die Bilder anzuzeigen, es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie rechts unten den Aufruf der Anzeige starten können.