

Einrichtung SIUI CTS 8800 mit DICOM-Option für sonoGDT

- Taste Setup (rechts neben der Leertaste)
- Menüpunkt Connection Setup anklicken anklicken
- **Statische IP (manuell) markieren**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- ComputerName: **(kann unverändert belassen werden)**
- OK anklicken

- DICOM Setup anklicken
- Die Local Konfiguration kann belassen werden

- Store anklicken, im folgenden Bildschirm New
- Facility: **SIUI**
- AE: **sonoGDT**
- IP: **IP des Servers**
- Port.: **105**
- Unter Picture:
- Compression: **uncompressed**
- Unter Film:
- Compression: **JPEG Lossless**
- Image Quality: **80**
- Den erstellten Eintrag in der Liste markieren
- Ping anklicken zum Test der Netzwerkverbindung
- Echo anklicken zum Test der DICOM-Verbindung
- Apply anklicken

- Worklist anklicken
- New anklicken
- Facility: **Worklist**
- AE-Title: **US01**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Port-Nr.: **104**
- Den erstellten Eintrag in der Liste markieren
- Ping anklicken zum Test der Netzwerkverbindung
- Echo anklicken zum Test der DICOM-Verbindung
- Apply anklicken
- Definieren Sie über Function Setup einen Hotkey zum Speichern der Bilder (Archive)

- Das Setup verlassen