

Einrichtung SIUI CTS 8800 mit DICOM-Option für sonoGDT

- Taste **SETUP** (rechts neben der Leertaste)
- Menüpunkt **CONNECTION SETUP ANKLICKEN** anklicken
- **USE THE FOLLOWING IP-ADDRESS** (Punkt setzen)
- **IP-ADRESSE:** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- **SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
- **STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
- **COMPUTERNAME:** (kann unverändert belassen werden)
- **OK** anklicken

- **DICOM SETUP** anklicken
- Die **LOCAL** Konfiguration kann belassen werden

- **STORE** anklicken, im folgenden Bildschirm **NEW**
- **FACILITY:** **SIUI**
- **AE:** **sonoGDT**
- **IP:** **IP_SERVER**
- **PORT.:** **105**
- unter Picture:
- **COMPRESSION:** **uncompressed**
- unter Film:
- **COMPRESSION:** **JPEG Lossless**
- **IMAGE QUALITY:** **80**
- **APPLY** anklicken
- Den erstellten Eintrag in der Liste markieren
- **ECHO** anklicken, die Verbindung muss erfolgreich bestätigt werden

- **WORKLIST** anklicken
- **NEW** anklicken
- **FACILITY:** **Worklist**
- **AE-TITLE:** **US01**
- **IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- **PORT-NR.:** **104**
- **APPLY** anklicken
- Den erstellten Eintrag in der Liste markieren
- **PING** anklicken (wenn kein Erfolg, Netzwerkverbindungen prüfen)
- **ECHO** anklicken (Worklistserver auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 104 freigeben)

- Definieren Sie über **FUNCTION SETUP** einen Hotkey zum Speichern der Bilder (Archive)

- Das Setup verlassen