

Einrichtung Samsung HS70 mit DICOM für sonoGDT

- Ausgangspunkt ist das neu eingeschaltete System
 - Touchscreen oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
 - Setup
 - Netzwerk-Konfiguration
 - **Statische IP (manuell) markieren**
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnet-Mask: **Subnetzmaske des Servers**
 - Default-Gateway: **Gateway-IP**
 - Preferred DNS-Server: **IP des US-Gerätes**
 - Alternativ DNS-Server: (Einträge belassen)
 - OK, alle Dialogfenster schließen
-
- Touchscreen Utility, Setup, Karteireiter DICOM
 - AE-Title (unverändert lassen)
 - Stationsname (unverändert lassen)
 - Port-Nr. (unverändert lassen)
-
- Unten links Button Hinzufügen
 - DICOM Service-Option: **Speicher**
 - Alias: **sonoGDT**
 - AE-Title: **sonoGDT**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Portnummer: **105**
 - Einschl. 3D-Volumen: **Nein**
 - (alle übrigen Einstellungen belassen)
 - Sichern
 - Den Service sonoGDT mit einem Mausklick markieren, unten auf Testen klicken
-
- Unten links Button Hinzufügen
 - DICOM-Serviceoption **Worklist** (rechts oben)
 - Alias: **Worklist**
 - AE-Title: **US01** (US null eins, kein anderer!)
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Portnummer: **104**
 - Update Methode: **Bei Start und alle 1 Min**
 - Geplante Station AE-Title: **Irgendeiner**
 - Datum beginn: **Heute**
 - Sichern
 - Den Service Worklist mit einem Mausklick markieren, unten auf Testen klicken
 - Speichern und Beenden
-
- Rechts unter Zielgruppe auf Gruppe Hinzufügen klicken, die Gruppe **sonoGDT** nennen
 - Links den DICOM-Speicherserver **sonoGDT** anklicken, diesen mit dem Pfeil zwischen DICOM-Konfiguration und Zielgruppe der Gruppe hinzufügen
 - Unten rechts unter DICOM-Transfermodus **Bild für Bild** senden markieren
 - Speichern und Beenden