

Einrichtung Samsung R3_R5 mit DICOM für sonoGDT

- Ausgangspunkt ist das neu eingeschaltete System
- Taste **8** (darüber ist ein Zahnradsymbol) drücken
- Karteireiter **DICOM** anwählen
- rechts auf den Button **NETZWERKKONFIGURATION** klicken
- HOSTNAME:** **SONOACE_R3** bzw. **(SONOACE_R5)**
- VERWENDEN DER DYNAMISCHEN IP-KONFIG:** **(nicht anwählen!)**
- IP-ADRESSE** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- SUBNETZMASKE** **SUBNETZMASKE**
- STANDARDGATEWAY** **GATEWAY**
- PRIMÄRER NAMESERVER (IP)** (kann frei bleiben)
- SEKUNDÄRER NAMESERVER (IP)** (kann frei bleiben)
- ANWENDEN** und **SCHLIESSEN** klicken

- zurück im Karteireiter **DICOM**
- AE-TITLE** (unverändert lassen)
- STATIONSNAME** (unverändert lassen)
- PORT-NR.** (unverändert lassen)

- ganz unten links Button **HINZUFÜGEN**
- SERVICE** **Speichern**
- ALIAS** **sonoGDT**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- AE-TITLE** **sonoGDT**
- PORTNUMMER:** **105**
- SENDE-MODUS** **Bild für Bild**
- (übrige Auswahlfelder unverändert lassen)
- ANWENDEN BZW. SPEICHERN**, Sie sind wieder im Karteireiter **DICOM**

- ganz unten links Button **HINZUFÜGEN**
- SERVICE** **Arbeitsliste**
- ALIAS** **Worklist**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- AE-TITLE** **US01** (US null eins, kein anderer!)
- PORTNUMMER:** **104**
- (die übrigen Einstellungen belassen)
- Unter **OPTION ARBEITSLISTE:**
- MWL MIT PATIENTENTASTE ÖFFNEN:** **markieren**
- METHODE AKTUALISIEREN:** **Beim Einschalten und jede 1 Minute**
- AE-TITLE D. VORGESEH. STAT.:** Markierung bei **Alle**
- STARTTERMIN:** Markierung bei **Heute**
- ANWENDEN**
- SPEICHERN** und **BEENDEN**