

Einrichtung Samsung UGEO mit DICOM für sonoGDT

- Taste **SETUP** (oberste Tastaturreihe)
- links im Menü **VERBINDUNG** (Maustaste ist die Taste **SET** links vom Trackball)
- Karteireiter **NETZWERK**
- Haken vor **AUTOM. KONFIGURATION (DHCP)** entfernen
- IP-ADRESSE** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- SUBNETZMASKE** **SUBNETZMASKE**
- STANDARDGATEWAY** **GATEWAY**
- BEVORZ. DNS-SERVER** (kann frei bleiben)
- ANWENDEN**

- Karteireiter **DICOM**
- NAME STATION** (unverändert lassen)
- PORT-NR.** (unverändert lassen)
- AE-TITLE** (unverändert lassen)

- SERVICE HINZUFÜGEN**
- DICOM-SERVICEOPTION** **Storage** (rechts oben)
- ALIAS** **sonoGDT**
- AE-TITLE** **sonoGDT**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- PORTNUMMER:** **105**
- TRANSFER-MODUS** **Nach Erfassung senden**
- MEHRFACHBILD SENDEN** **Ja**
- EINSCHL. 3D-VOLUMEN** **nein**
- IN GRAUSTUFEN KONVERT.** **Keine Konvertierung**
- EINZELBILD KOMPRIMIERUNG** **keine**
- MEHRFACHBILD-KOMPRIMIERUNG** **JPEG baseline, BILDRATE 25**
- ANWENDEN**

- SERVICE HINZUFÜGEN**
- DICOM-SERVICEOPTION** **Worklist** (rechts oben)
- ALIAS** **Worklist**
- AE-TITLE** **US01** (US null eins, kein anderer!)
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- PORTNUMMER:** **104**
- ABFRAGE EINSTL. MODALITÄT** **US**
- ANWENDEN**
- SPEICHERN** und **BEENDEN**