

Einrichtung Samsung UGEO H60 mit DICOM für sonoGDT

- Taste Setup (oberste Tastaturreihe)
- links im Menü Verbindung (Maustaste ist die Taste set links vom Trackball)
- Karteireiter Netzwerk
- **Statische IP (manuell) markieren**
- IP-Adresse **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway **Gateway-IP**
- Bevorz. DNS-Server (kann frei bleiben)
- Anwenden

- Karteireiter DICOM
- Name Station (unverändert lassen)
- Port-Nr. (unverändert lassen)
- AE-Title (unverändert lassen)

- Service Hinzufügen
- DICOM-Serviceoption **Storage** (rechts oben)
- Alias **sonoGDT**
- AE-Title **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Portnummer: **105**
- Transfer-Modus **Nach Erfassung senden**
- Mehrfachbild senden **Ja**
- Einschl. 3D-Volumen **nein**
- In Graustufen konvert. **Keine Konvertierung**
- Einzelbild Komprimierung **keine**
- Mehrfachbild-Komprimierung **JPEG baseline, Bildrate 25**
- Anwenden

- Service Hinzufügen
- DICOM-Serviceoption **Worklist** (rechts oben)
- Alias **Worklist**
- AE-Title **US01** (US null eins, kein anderer!)
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Portnummer: **104**
- Abfrage einstel. Modalität **US**
- Anwenden
- Speichern und Beenden