

sonoGDT - Umzug auf einen neuen Server

Am alten Server:

1. Öffnen sonoGDT_Diagnose, beenden Sie sonoGDT über grünen Button rechts oben.
2. Deaktivieren Sie die Lizenz, damit Sie für den neuen Server frei ist. Klicken Sie dazu mit gedrückter CTRL-Taste auf Lizenzmanagement, geben Sie den Aktivierungskey ein und klicken Sie auf Deaktivieren.

Hinweis 1: Der Key sollte der Praxis vorliegen, falls nicht, können Sie den Key per Mail an info@sonoGDT.de unter Angabe der Praxisdaten erfragen.

Hinweis 2: Falls der Aktivierungsserver nicht erreicht werden kann, prüfen Sie, ob sonoGDT ab Version 25.0 vorliegt. Falls nicht, aktualisieren Sie die Installation über den Button **Prüfe auf Updates** und versuchen Sie es erneut.

3. Kopieren Sie den sonoGDT-Ordner auf den neuen Server an seinen endgültigen Speicherort.
4. Prüfen Sie, ob sich nach dem Kopieren auf dem neuen Server im Unterordner ..\sonoGDT\Bildarchiv die Bilder befinden, wenn ja, können Sie mit dem nächsten Punkt fortfahren.

Sind die Bilder nicht in diesem Ordner, dann war am alten Server ein anderer Speicherort für den Bildarchivordner definiert. Diesen finden Sie im sonoGDT-Verzeichnis in der Datei **settings.ini** unter dem Eintrag **Zielordner**. Kopieren Sie den Inhalt des dort hinterlegten Ordners auf den neuen Server und passen Sie den Pfad in der **settings.ini** an. Verwenden Sie dazu einen UNC-Pfad, denn jeder Arbeitsplatz muss künftig die Bilder unter genau dieser Pfadangabe erreichen können.

Am neuen Server:

1. Laden Sie unter www.sonoGDT.de das **Installationsfile für Neuinstallationen** und **installieren** Sie es noch einmal **über den bereits kopierten Ordner**. Dabei werden die bisherigen Einstellungen beibehalten, alle Programmdateien aktualisiert und der Installationspfad für künftige Ein-Click-Updates gespeichert.
2. Starten Sie **sonoGDT_Diagnose**, das Icon finden Sie nach der Installation auf dem Desktop, alle folgenden Angaben beziehen sich auf sonoGDT_Diagnose:
3. Falls sich der Name des neuen Servers vom alten unterscheidet, klicken Sie auf **settings.ini, Suchen und Ersetzen** Sie im Editor alle Vorkommen von **\\alterservername** durch **\\neuerservername**
4. Klicken Sie auf **Lizenzmanagement**, geben Sie in das Fenster Ihren Aktivierungskey ein, füllen Sie die notwendigen Eingabefelder aus und klicken sie auf **Aktivieren**. Falls die Aktivierung fehlschlägt, prüfen Sie, ob am alten Server Schritt 2 vorgenommen wurde. Sollte der Aktivierungskey noch nicht vorliegen, fahren Sie zunächst fort, sonoGDT läuft für 30 Tage im Testmodus ohne Einschränkungen.
5. Wählen Sie als Starttyp rechts oben **Als Anwendung**, starten Sie sonoGDT über den farbigen Button, erlauben Sie die Rückfragen der Firewall. Nach den Firewall-Freigaben können Sie sonoGDT wieder beenden, den Starttyp auf **als Hintergrunddienst** ändern und erneut starten.
6. Hat sich die IP-Adresse des Servers geändert, muss diese auch in den Ultraschallsystemen angepasst werden, da sie dort in der DICOM-Konfiguration bzw. in Netzwerkexport-Konfigurationen als Ziel hinterlegt ist. Anleitungen zur Konfiguration der Ultraschallgeräte finden Sie auf www.sonoGDT.de