

Konfiguration Acuson Juniper mit DICOM

(Hinweis: **\$USIP\$** u. ä. im folgenden Text sind Platzhalter und mit den jeweiligen Daten aus der Praxis zu ersetzen!)

- Auf dem Touchscreen oben links das **Zahnradsymbol** antippen
- am Monitor **Netzwerk** (links weiter unten im Menü) anklicken. Hinweis: (Maustaste ist die Fadenkreuztaste neben dem Trackball

- Karteireiter **Lokaler Host**
- **Neu** anklicken
- **Punkt setzen** bei Statische IP-Adresse
- Alias: **Juniper**
- AE-Title: **Juniper**
- Hostname: **Juniper**
- IP-Adresse: **\$USIP\$**
- Subnetz-Maske: **\$SUBNETZMASKE\$**
- Standard-Gateway: **\$GATEWAY\$**
- **Anwend.** anklicken

- Karteireiter **Speicherserver**
- **Neu** anklicken
- Alias: **sonoGDT**
- AE-Title: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
- Portnr.: **\$PORTSTORAGE\$**
- rechts **SR senden** markieren
- alle anderen Einstellungen belassen, **Anwend.** anklicken
- den Haken vor dem Eintrag **sonoGDT** setzen
- rechts **Auto-Speichern auf DICOM** markieren
- den Punkt setzen **Bei Untersuchung speichern**

- Karteireiter **Arbeitslistenserver**
 - **Neu** anklicken
 - Alias: **Worklist**
 - AE-Title: **US01**
 - IP-Adresse: **\$SERVERIP\$**
 - Portnr.: **\$PORTWL\$**
 - alle anderen Einstellungen belassen, **Anwend.** anklicken
 - rechts **Einfache Suche** und **Strenge Überprüfung** markieren
- ganz rechts unten **Schließen** anklicken